



## Consignes concernant l'installation de nouvelles piles et l'étiquette d'échéance des piles pour le défibrillateur AED Plus de ZOLL

**Remarque :** changez les piles de votre défibrillateur AED Plus trois ans après la date d'installation de nouvelles piles.

1. Assurez-vous que l'AED Plus est éteint. Ouvrez le compartiment à piles en enlevant son couvercle, situé à l'arrière de l'appareil.
2. Enlevez toutes les piles et jetez-les convenablement. Insérez de nouvelles piles dans le compartiment à piles, en observant les marques indiquant les pôles et en vous assurant que les piles sont bien logées et orientées. Après avoir inséré les 5 à 9 premières piles dans le compartiment, le signal audio INSTALL BATTERIES vous rappelle d'installer les autres piles dans le compartiment à piles.
3. Après avoir installé les nouvelles piles, appuyez sur le bouton « Battery Reset » (réinitialisation des piles) dans le compartiment à piles lorsque vous y êtes invité. Ce bouton réinitialise l'indicateur d'état des piles à « charge complète ».
4. Refermez le compartiment à piles.
5. Retournez l'AED Plus.
6. Mettez la main sur l'étiquette de date d'échéance des piles, comprise dans l'ensemble de piles.
7. Inscrivez la date d'échéance des piles sur l'étiquette. (Trois ans à partir de la date d'installation des piles.) Par exemple, si vous installez les piles le (22/03/2009), la date d'échéance sera le (22/03/2012).
8. Décollez l'étiquette.
9. Collez-la sur l'AED Plus, sous l'« indicateur d'état », tel qu'illustré.

Explication des symboles :

 - Remplacez les piles au plus tard le <date>  




Positionnez l'étiquette d'échéance des piles du défibrillateur sous l'indicateur d'état de l'AED Plus

