

8 Si le choc est déconseillé ou s'il a été délivré, "Commencer le massage cardiaque".


Pendant les compressions thoraciques, le ZOLL AED 3 émettra des messages Real CPR Help® concernant la qualité des compressions de RCP




7 Si un choc est conseillé, "Appuyer sur le bouton de choc clignotant"



6 "Ne pas toucher la victime. Analyse en cours."

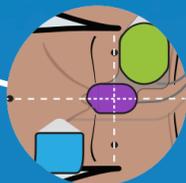

5 "Appliquer les électrodes de défibrillation sur la poitrine nue du patient"

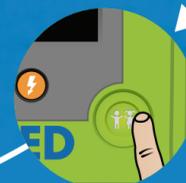

4 "Si la victime est un enfant, appuyer sur le bouton Enfant"

1 Mettez le DA sous tension



2 "Vérifier l'état de conscience"



3 "Demander de l'aide"

