

DURCHFÜHREN EINER REANIMATION

1



Reagiert der Patient?

2



Rufen Sie den Rettungsdienst!

3



AED holen.

4




AED am Boden abstellen.
Abdeckung öffnen.

5




Kleidung entfernen.
Brust freilegen.

6

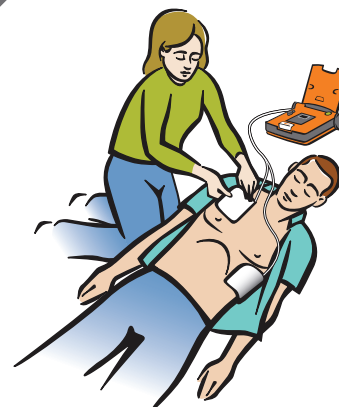

Elektroden anbringen.

7

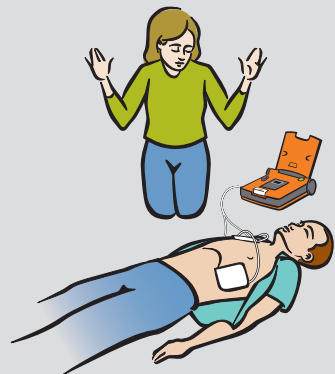


Berühren Sie den Patienten
nicht während der Analyse.

8




Bei Anweisung die rot
blinkende Taste drücken.

9

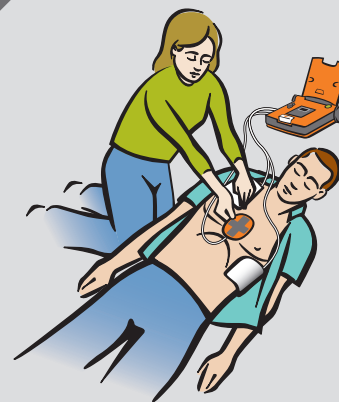

HLW-Gerät anbringen,
wenn vorhanden.

10

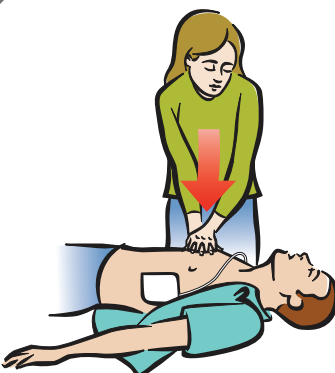

Anweisungen des
AED befolgen.
Kompressionen durchführen.

11



Bei Anweisung
Atemspenden geben.

Halbautomatischer AED



Cardiac Science und das Shielded Heart-Logo sind Marken
der Cardiac Science Corporation.
Copyright © 2019 Alle Rechte vorbehalten.
500 Burdick Parkway, Deerfield, Wisconsin 53531 USA
www.cardiacscience.com



MDSS GmbH
Schiffgraben 41
D-30175 Hannover
Germany



70-01972-84 A



ESECUZIONE DI UN INTERVENTO

1



Il paziente reagisce?

2




Chiamare il servizio di emergenza.

3



Recuperare il DAE.

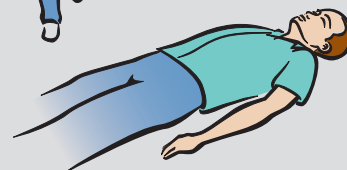

4




Appoggiare il DAE a terra. Aprire il coperchio.

5



Rimuovere gli indumenti. Esporre il torace.

6

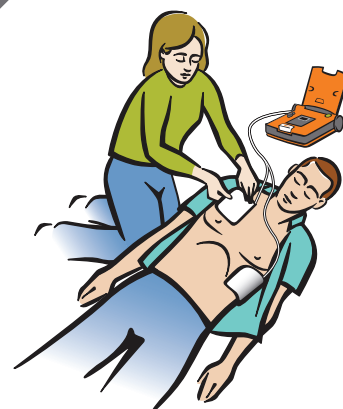

Applicare gli elettrodi.

7




Non toccare il paziente.

8




Se richiesto, premere il pulsante rosso lampeggiante.

9

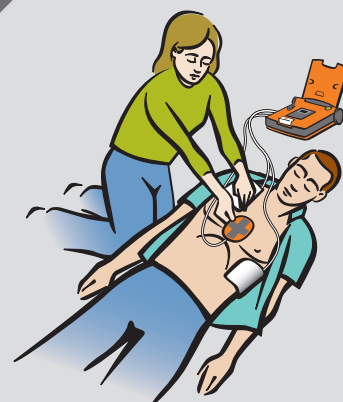

Se presente, posizionare il dispositivo per RCP.

10

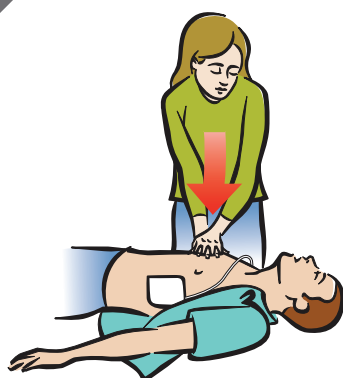

Seguire i messaggi del DAE. Eseguire le compressioni.

11



Se richiesto, dare i respiri.

DAE semiautomatico



Cardiac Science e il logo Shielded Heart sono marchi di Cardiac Science Corporation.
Copyright © 2019 Tutti i diritti riservati.
500 Burdick Parkway, Deerfield, Wisconsin 53531 USA
www.cardiacscience.com



MDSS GmbH
Schiffgraben 41
D-30175 Hannover
Germania



70-01972-84 A

