

DÉROULEMENT D'UNE INTERVENTION

1



Le patient réagit-il ?

2




Appelez les services d'urgence !

3



Munissez-vous d'un DAE.

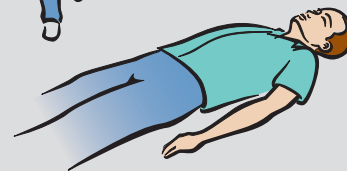

4




Posez le DAE sur le sol.
Ouvrez le couvercle.

5



Enlevez les vêtements.
Dénudez le thorax.

6

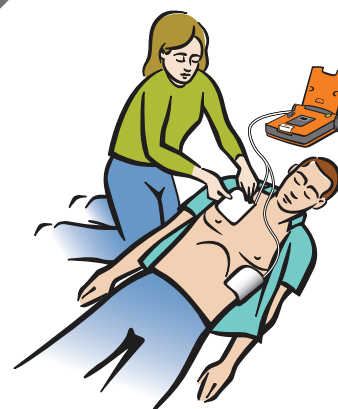

Placez les électrodes.

7




Ne touchez pas le patient.

8




Si nécessaire, le DAE administre automatiquement le choc.

9

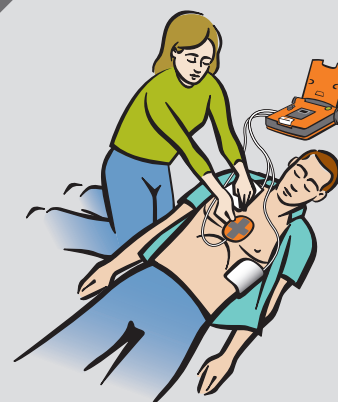

Si un appareil de RCP est disponible, positionnez-le.

10

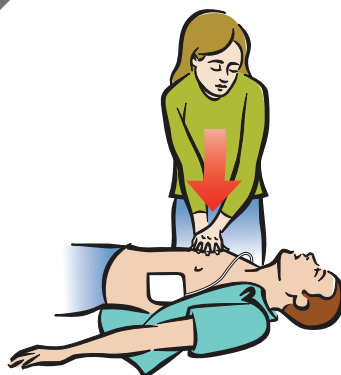

Suivez les invites du DAE.
Administrez les compressions.

11



Si le système vous y invite,
administrez les insufflations.

DAE automatisé



Cardiac Science et le logo Shielded Heart sont des marques commerciales de Cardiac Science Corporation.
Copyright © 2019. Tous droits réservés.

500 Burdick Parkway, Deerfield, Wisconsin 53531, États-Unis
www.cardiacscience.com



MDSS GmbH
Schiffgraben 41
D-30175 Hanovre
Allemagne



70-02001-83 A



DURCHFÜHREN EINER REANIMATION

1



Reagiert der Patient?

2



Rufen Sie den Rettungsdienst!

3



AED holen.

4



AED am Boden abstellen.
Abdeckung öffnen.

5



Kleidung entfernen.
Brust freilegen.

6



Elektroden anbringen.

7



Berühren Sie den Patienten
nicht während der Analyse.

8




Bei Bedarf gibt der AED
automatisch einen Schock ab.

9



HLW-Gerät anbringen,
wenn vorhanden.

10

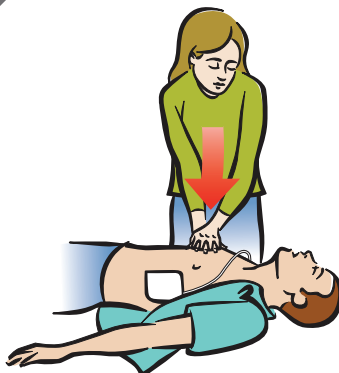

Anweisungen des
AED befolgen.
Kompressionen durchführen.

11



Bei Anweisung
Atemspenden geben.

Automatischer AED



Cardiac Science und das Shielded Heart-Logo sind Marken
der Cardiac Science Corporation.
Copyright © 2019 Alle Rechte vorbehalten.
500 Burdick Parkway, Deerfield, Wisconsin 53531 USA
www.cardiacscience.com



MDSS GmbH
Schiffgraben 41
D-30175 Hannover
Germany



70-02001-83 A

