

מדריך עזר להצלת חיים

ZOLL AED 3®

1 הפעל את ה-AED




2

"בדוק הכרה"




3

"קרא
לעזרה"

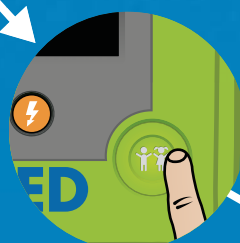

4

"אם מדובר בילד,
לחץ על לחצן הילדים"

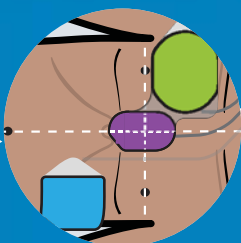

5

"חבר את האלקטרודות
לחזה החשוף של המטופל"

8

אם אין המלצה למתן שוק חשמלי
או לאחר ביצוע שוק חשמלי, "התחל החייאה"

במהלך לחיצות על החזה,
ה-ZOLL AED 3 יספק הנחיות
ל-Real CPR Help בנוגע
לאיכות לחיצות ההחייאה




7

אם יש המלצה
למתן שוק חשמלי,
"לחץ על לחצן
השוק המהבהב"



6

"אין לגעת
במטופל.
מתבצעת אנליזה"

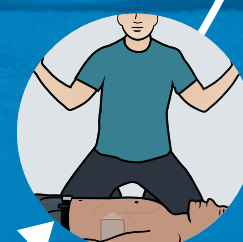

ZOLL®

לקבלת מידע נוסף על ZOLL AED 3,
בקר אותנו בכתובת zoll.com/aed3.