

מדריך עזר להצלת חיים

ZOLL AED 3®

אוטומטי

1 הפעל את ה-AED




2 "בדוק הכרה"




3 "קרא לעזרה"




4 "אם מדובר בילד, לחץ על לחצן הילדים"

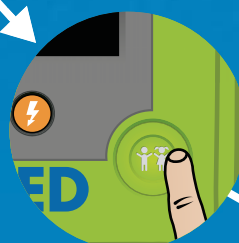

5 "חבר את האלקטרודות לחזה החשוף של המטופל"

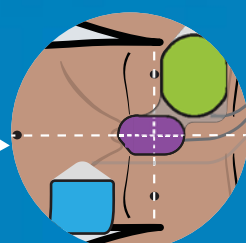

6 "אין לגעת במטופל. מתבצעת אנליזה"

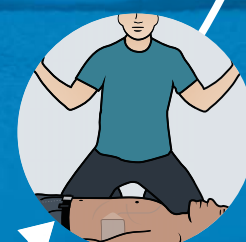

7 אם אין המלצה למתן שוק חשמלי או לאחר ביצוע שוק חשמלי, "בוצע שוק חשמלי"



8 אם אין המלצה למתן שוק חשמלי או לאחר ביצוע שוק חשמלי, "התחל החייאה"



במהלך לחיצות על החזה, ה-יטמוטוא ZOLL AED 3 יספק הנחיות Real CPR Help® בנוגע לאיכות לחיצות ההחייאה



ZOLL®

לקבלת מידע נוסף על ZOLL AED 3 אוטומטי, בקר אותנו בכתובת zoll.com/aed3.