

10 Ako se šok ne preporučuje ili nakon što se šok isporuči, „Započnite reanimaciju”

Za vrijeme kompresije prsnog koša ZOLL AED 3 daje poruke značajke Real CPR Help[®] radi kvalitete reanimacijske kompresije

1 Uključite AED

2 „Provjerite svijest”

3 „Pozovite pomoć”

4 „Otvorite dišni put”

5 „Provjerite disanje”

6 „Ako je pacijent dijete, pritisnite tipku Dijete”

7 „Postavite elektrode na gola prsa pacijenta”

8 „Ne dodirujte pacijenta. Analiza u toku.”

9 Ako se šok preporučuje, „Pritisnite svjetleću tipku šok”

