

10 Ak sa neodporúča výboj alebo po podaní výboja, "Začnite KPR"

Počas stláčania hrudníka bude prístroj ZOLL AED 3 poskytovať funkciu Real CPR Help®, ktorá vyzýva ku kvalitným kompresiam počas KPR.

1 Zapnite AED



2 "Skontrolujte vnímanie"



3 "Zavolajte pomoc"




4 "Uvoľnite dýchacie cesty"




5 "Skontrolujte dýchanie"



6 "Ak je pacient dieťa, stlačte tlačidlo dieťaťa"

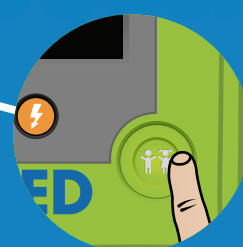

7 "Priložte elektródy k nahej hrudi pacienta"

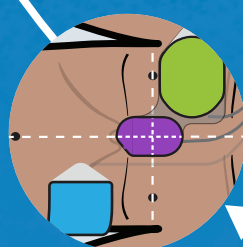

8 "Nedotýkaj sa pacienta. Analyzujem"



9 Ak sa odporúča výboj, "Stlačte blikajúce tlačidlo Výboj"

