



AED Manager 사용

Copyright © 2026 ZOLL Medical Corporation. All rights reserved.

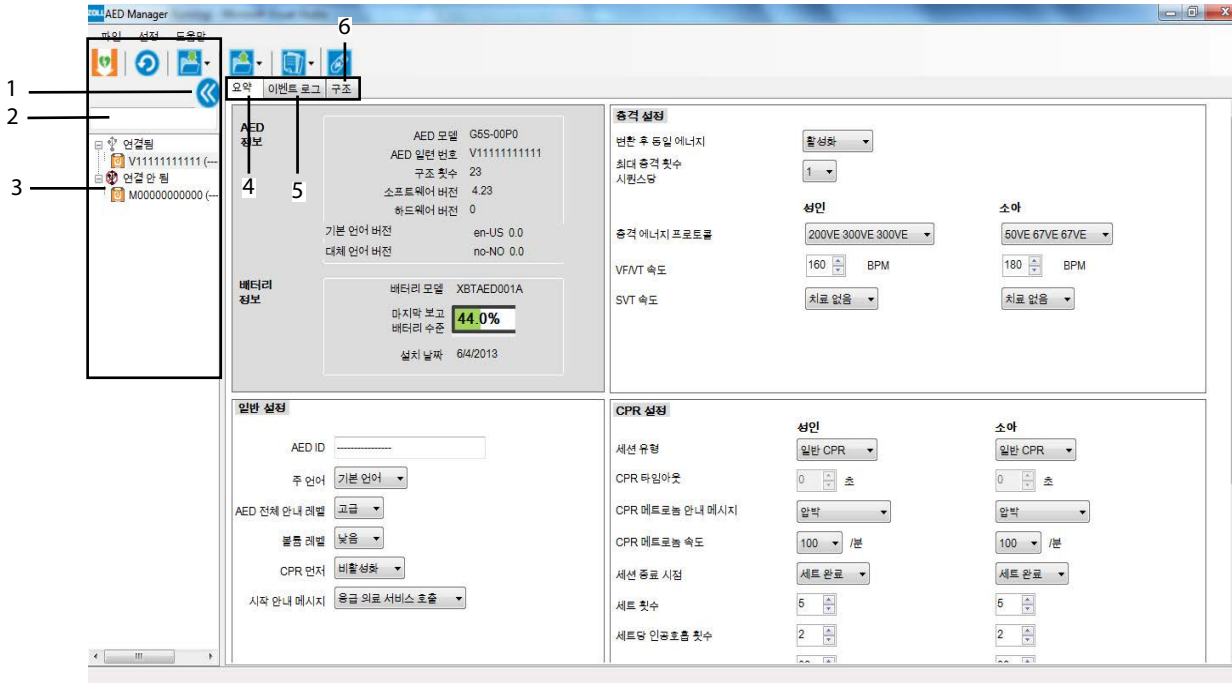
AED Manager 개요

AED Manager는 의료 책임자, 자동 제세동기(AED) 관리자, 및 응급 구조원 등이 Powerheart® G5 AED를 구성하고 급성 심장 마비 환자 구조 건에 대해 검토할 수 있도록 지원합니다.

AED Manager 활용법	참조 페이지
특정 사용자의 교육에 대한 요구와 언어에 맞춰 RescueCoach™ 오디오 및 환자 구조 관련 시각적 안내 메시지를 선택합니다.*	9페이지
환자 구조 프로토콜의 다양한 항목(CPR 기간 및 유형, 충격 가능 조건 등)을 사용자 지정합니다.	9페이지
환자 ECG를 포함한 환자 환자 구조 건을 검토합니다.	13페이지
구조별 정보를 사용자 지정하여 AED에 기록된 데이터에 추가합니다.	16페이지
각 AED에 대한 자가 테스트와 기타 이벤트 메시지를 확인합니다.	17페이지
환자의 연령 및 성별과 구조 데이터를 포함한 저장된 데이터를 다른 응용 프로그램에서 사용할 수 있도록 내보냅니다	18페이지
PDF 보고서 인쇄 및 저장	18페이지
원격 AED 구성	19페이지

참고: *모든 환자 구조 설정은 권한이 부여된, 적절한 교육을 받은 의료 담당자만이 조정할 수 있습니다.

AED Manager 창 개요



AED 목록

- 1 화살표를 클릭하여 AED 목록을 숨기거나 표시합니다.
- 2 검색 상자 목록에 표시할 AED 이름 또는 일련 번호를 입력하십시오.
- 3 기존에 또는 현재 컴퓨터에 연결된 AED 목록 AED를 선택하면 해당 AED 관련 정보를 볼 수 있습니다.
 - +를 클릭하면 연결된 또는 연결되지 않은 AED 목록이 표시됩니다. 목록이 확장되어 표시된 경우 -를 클릭하면 AED 목록을 숨길 수 있습니다.

AED 구성 및 정보 탭

- 4 이름, 유형 및 배터리 상태를 포함한 AED 관련 일반 정보. AED 설정을 여기서 구성합니다.
- 5 AED에서 저장한 메시지 보기.
- 6 구조 세션의 기록 보기.

AED Manager 설치

AED Manager는 Windows 10 및 Windows 11에서 지원됩니다.

AED Manager를 설치하려면 ZOLL 제품 자료 웹사이트로 이동하여 'Software/AED Manager'를 검색한 후 설치용 .zip 파일을 다운로드하십시오.

Windows의 '압축 풀기...' 기능을 사용하여 설치 파일을 압축 해제하십시오.

setup.exe 파일을 찾아 두 번 클릭하십시오.

일부 컴퓨터에서는 AED Manager 설치 시 Windows Defender 경고가 표시될 수 있습니다.



AED Manager를 계속 진행하려면 "More info(추가 정보)"를 선택한 다음 "Run anyway (실행)"을 선택하십시오.

설치 과정은 자동 안내 방식으로 진행되며, 언어 선택, 사용권 계약 검토, 관리자 비밀번호 설정이 포함됩니다. 설치가 완료되면 바탕화면에 AED Manager 아이콘이 생성됩니다.

AED Manager 실행



AED Manager를 열려면:

바탕화면의 **AED Manager** 아이콘을 두 번 클릭하십시오.

시작 화면이 나타나면 **관리자** 또는 **일반 사용자**를 선택하십시오. 관리자를 선택한 경우 **관리자** 비밀번호를 입력해야 합니다.

- ▲ 관리자 권한을 사용하면 AED 정보를 확인할 뿐만 아니라 AED 설정을 변경하고 업데이트할 수 있습니다.

중요: 관리자 권한은 AED의 구조 프로토콜 또는 기타 치료 설정을 변경할 수 있는 의학 적 교육과 권한을 가진 사람으로 제한되어야 합니다.

- ▲ **일반 사용자** 권한에서는 AED 정보를 조회, 내보내기, 인쇄만 할 수 있습니다.

계속을 클릭하십시오.

AED Manager 응용 프로그램 기본 설정 구성하기

설정 | 기본 설정을 선택합니다.

일반 패널에서 기본 설정을 다음과 같이 구성합니다.

- ▲ **언어:** AED Manager에서 사용할 언어.

참고: 선택된 언어를 적용하려면 AED Manager를 다시 시작해야 합니다.

- ▲ **비밀번호:** 관리자 권한으로 AED Manager를 시작한 경우, '비밀번호 변경'을 클릭하여 관리자 비밀번호를 업데이트할 수 있습니다.

내보내기 패널에서 내보내는 환자 구조 데이터가 저장되는 폴더를 선택합니다. 폴더를 선택하려면 **찾아보기**를 클릭하고 사용하려는 폴더로 이동합니다.

AED Manager로 AED 데이터 전송

USB 플래시 드라이브를 이용하거나 USB 케이블을 직접 연결하여 구조 및 이벤트 데이터를 하나 또는 여러 대의 AED에서 *AED Manager*로 전송할 수 있습니다. AED를 컴퓨터로 옮기는 대신, 보관 장소에서 플래시 드라이브를 사용하여 AED를 재구성할 수도 있습니다.



경고! 감전 및 화재 위험

전화기나 인증 받지 않은 커넥터를 본 장치의 소켓에 연결하지 마십시오.



주의. 데이터 손실 가능성

데이터 전송 중에 플래시 드라이브를 제거하거나 AED 연결을 분리하지 마십시오.

USB 플래시 드라이브

1단계

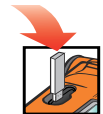
제세동기 패드 연결을 분리합니다.



2단계

USB 포트에 플래시 드라이브를 장착합니다.

- AED가 플래시 드라이브에 정보를 복사합니다.
- 이 작업이 완료되면 AED에 플래시 드라이브를 제거하라는 메시지가 안내됩니다.



3단계

플래시 드라이브를 제거합니다.



4단계

패드를 AED에 연결하고 뚜껑을 닫습니다.

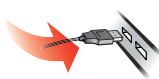


데이터를 보려면:

- ▲ 플래시 드라이브를 컴퓨터의 USB 포트에 연결합니다. Windows Explorer 창이 열리면 이 창을 닫습니다. *AED Manager*를 시작하십시오.

데이터가 드라이브에 저장된 각각의 AED가 '연결 안 됨' 아래에 있는 AED 목록에 나타납니다. 연결된 AED에서와 마찬가지로 데이터 보기, 인쇄 및 내보내기를 할 수 있습니다.

USB 케이블

1단계	제세동기 패드 연결을 분리합니다.	
2단계	USB 포트에 USB 케이블을 연결합니다.	
3단계	케이블의 반대쪽 끝은 컴퓨터의 USB 포트에 연결합니다. Windows Explorer 창이 열리면 이 창을 닫습니다. AED에서 "통신 모드"라는 메시지가 안내됩니다.	
4단계	<i>AED Manager</i> 를 실행합니다. • AED가 AED 목록에 나타나고 데이터가 AED Manager 데이터 베이스에 복사됩니다.	
5단계	USB 케이블을 분리합니다. AED 연결을 분리하면 AED 목록의 해당 아이콘이 연결됨 에서 연결 안 됨 으로 이동합니다.	
6단계	패드를 연결합니다.	

AED 및 환자 구조 매개 변수 설정

중요: 구조 매개 변수를 변경하려면 관리자 권한이 필요합니다. AED Manager를 시작할 때 관리자로 로그인하십시오. 현재 일반 사용자로 실행 중이라면 종료한 후 다시 시작하십시오.

현재 AED 구성을 표시하려면 AED 목록에 있는 해당 아이콘이나 이름을 클릭합니다.

요약 탭에 들어가서 보유하고 있는 각 AED의 다양한 속성을 사용자 설정할 수 있습니다. 요약 창에 있는 패널에서 다음과 같은 각각의 AED 기능을 설정합니다.

일반 설정	언어 및 환자 구조 메시지 안내	9페이지
시간 설정	AED 시계의 날짜 및 시간	10페이지
충격 설정	제세동 치료 설정	10페이지
CPR 설정	성인 및 소아 치료를 위한 CPR 프로토콜	11페이지
CPR 장치 설정	CPR 장치 지원과 함께 성인용 패드가 AED에 부착된 경우 CPR 메시지 안내 임계값	12페이지

매개 변수 설정을 완료하면, **구성 저장** 또는 **AED에 저장** 도구 모음 아이콘을 클릭하면, AED Manager가 연결된 AED로 설정된 구성을 전송합니다.

모든 구성 탭의 모든 구성 설정을 마지막으로 저장한 원래의 값으로 되돌리려면, **모든 변경 사항 취소** 도구 모음 아이콘을 클릭합니다.

AED 설정을 제품 출고 시 설정 값으로 되돌리려면, **출고 시 기본 설정 복원**을 클릭한 다음 저장합니다.

일반 설정: 언어 및 메시지 안내 설정하기

일반 설정 패널을 사용하여 다음 기본 설정을 구성합니다.

기본 설정	설명
AED ID	AED 목록 또는 보고서에 나타나는 AED 이름 이름은 최대 16글자까지 가능합니다. 다음 문자 중에서 선택해서 사용하십시오: A-Z, a-z, 0-9, 대시, 빈 칸. 한 개 이상의 AED를 관리하는 경우에는 장치 위치에 따라 이름을 부여하는 등의 방식으로 명명 규칙을 정합니다.
주 언어 (이중 언어 사용 모델 전용)	뚜껑이 열릴 때 AED에서 사용하는 언어를 선택합니다. 구조 중에도 다른 표시 언어로 변경할 수 있습니다.
AED 전체 안내 레벨	기본, 표준 또는 고급 각 레벨에서 사용되는 설명과 안내는 <i>Powerheart G5 사용 설명서</i> 를 참조하십시오.
볼륨 레벨	낮음 - 진료실 또는 기타 조용한 장소에서 사용합니다. 최대 - 실외 또는 소음이 심한 환경에서 사용합니다.
CPR 먼저	AED는 환자의 ECG를 분석하거나 구조원에게 CPR 실시를 지시함으로써 환자 구조 세션을 시작할 수 있습니다. 활성화 - AED가 CPR을 먼저 실시하라는 안내 메시지를 제공합니다. 비활성화 - AED가 환자의 ECG를 먼저 분석합니다.
시작 안내 메시지	뚜껑이 열릴 때 AED가 최초 안내 메시지를 제공합니다. 안내 메시지 없음: AED에서 시작 안내 메시지가 나오지 않습니다. 안내 메시지가 나오는 경우 다음 중 하나를 선택합니다. 119에 전화(미국은 911, 호주는 000으로 전화) - 응급 의료 서비스 호출

시간 설정: 시계 설정하기

AED의 시계를 설정하려면

- 1. 시간대/UTC 오프셋에서 사용 지역의 시간대를 선택합니다.
- 2. 날짜/시간 동기화를 클릭합니다.

참고: G5 장치에 설정된 시간은 일광절약시간제에 따라 조절됩니다.

쇼크 설정

AED는 성인 및 소아용 패드에 대해 각기 다른 프로토콜을 적용할 수 있습니다.

기본 설정	설명
변환 후 동일 에너지	이 옵션이 활성화되면 AED가 다음 번 충격이 필요할 때 환자가 충격 불가 박동 상태인 경우 이전 제세동과 동일한 에너지를 전달합니다.
시퀀스당 최대 충격 횟수	AED가 CPR 모드로 들어가기 전에 전달될 수 있는 충격 횟수
충격 에너지 프로토콜	충격에 의해 전달되는 에너지에 대한 프로토콜을 선택합니다. AED에 소아용 제세동기 패드가 연결된 경우 소아용 필드에 있는 숫자가 사용됩니다.

CPR 설정 : 구조 매개 변수 설정하기

AED 는 성인과 아동 (소아) 에 대해 각기 다른 환자 구조 프로토콜을 제공할 수 있습니다 .

기본 설정	설명
세션 유형	전통적 CPR (가슴 압박 및 인공호흡) 또는 가슴 압박만 . 흉부압박만 은 CPR 타임아웃과 메트로놈 설정만 사용합니다.
CPR 타임아웃	초 단위의 각 CPR 세션 지속 시간. AED에 있는 카운트다운 타이머가 남은 시간을 표시합니다.
CPR 메트로놈 안내 메시지	흉부압박 속도를 표시하여 구조원이 이에 맞출 수 있도록 합니다 . 압박 - 선택된 CPR 메트로놈 속도에서 실제 목소리로 주어지는 "압박하세요" 안내 메시지. 알림음 - AED는 CPR 메트로놈 속도로 기계적인 메트로놈 소리를 제공합니다. 메트로놈 없음 - 소리가 제공되지 않습니다.
CPR 메트로놈 속도	분당 압박수로 표시되는 메트로놈 안내 메시지 속도
세션 종료 시점	이 기본 설정은 전체 세션 진행 시간을 결정합니다. 세트 완료 - CPR 세트가 주어진 횟수대로 모두 완료되면 CPR 세션이 종료됩니다. 각 세트는 세트당 흉부압박 횟수와 세트당 인공호흡 횟수를 포함합니다. 시간 만료 - CPR 타이머가 0이 되면 세션이 종료됩니다. 마지막 세트의 흉부압박과 인공호흡은 부분적으로만 완료될 수 있습니다.
세트 횟수	전통적 CPR 및 '세트 완료'를 사용하는 경우, 구조자가 가슴 압박과 인공호흡의 조합을 수행하도록 안내받는 횟수입니다.
세트당 인공호흡 횟수	다음 세트의 흉부압박을 시작하기 전에 실시해야 할 인공호흡 횟수
세트당 흉부압박 횟수	인공호흡을 실시하기 전에 실시해야 할 흉부압박 횟수

CPR 장치 설정 : CPR 장치 임계값 설정하기

CPR 장치를 사용하는 구조에 대한 CPR 프롬프트 임계값을 설정하려면 **CPR 장치 설정** 패널에서 기본 설정을 수정하십시오.

기본 설정	설명
흉부압박 속도 (흉부압박 횟수/분)	최소: 구조원이 이 속도보다 느리게 흉부압박을 실시하면 AED에서 "더 빨리 압박하세요"라는 메시지가 나옵니다. 최대: 구조원이 이 속도보다 빠르게 흉부압박을 실시하면 AED에서 "더 천천히 압박하세요"라는 메시지가 나옵니다.
압박 깊이(cm)	최소: 구조원이 이 흉부압박 깊이까지 누르지 못하면 AED에서 "더 세게 압박하세요"라는 메시지가 나옵니다. 최대: 구조원이 이 깊이 보다 더 세게 누르면 AED에서 "더 약하게 압박하세요"라는 메시지가 나옵니다.

구조 검토

구조 탭에 있는 요약 탭에는 시간, 주어진 제세동 충격 횟수 그리고 구조 기간이 표시됩니다.

구조 센터

요약

AED 스냅샷

구조 요약

사고 정보

사고 ID

767_1846_46

날짜/시간

4/30/2014 1:00:33 PM (+-)DST

충격 횟수

0

구조 기간

693 초

구조 시점에서의 AED에 대해 프로그램된 모든 설정을 확인하려면 **AED 스냅샷** 탭을 클릭합니다. 설정에 대한 설명을 보려면 8-12페이지의 *AED 및 환자 구조 매개 변수 설정*을(를) 참조하십시오.

ECG 파형 및 구조 이벤트 보기

구조 센터 탭에 있는 **파형 및 이벤트** 탭을 클릭합니다.

이벤트 목록에 AED가 환자 구조 중에 수행한 모든 AED 작업이 표시됩니다.

이벤트 목록 아래의 그래프에는 구조 이벤트와 함께 환자의 ECG 및 CPR 장치의 지원을 받은 CPR 기록이 표시됩니다.

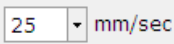
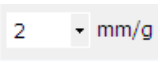
▲ 이벤트 목록의 항목을 선택합니다.

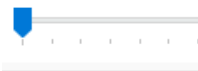
이벤트가 발생했을 때의 환자 구조가 이루어진 위치로 그래프가 이동합니다.

▲ 파형 상에서 마우스로 끌어다 놓는 방식으로 파형을 시간에 따라 앞뒤로 스크롤할 수 있습니다.

▲ 파형에 주석을 추가합니다. 차트 상에 주석이 표시될 위치에서 마우스 오른쪽 버튼을 클릭합니다. 컨텍스트 메뉴에서 **사용자 주석 추가**를 선택합니다. **이벤트 생성/편집 대화 상자**에서 이름과 주석 내용을 입력한 다음 **저장**을 클릭합니다.

▲ 재생기 컨트롤을 사용하면 실시간(구조 시 1초는 재생 시 1초에 해당)으로 환자 구조 이벤트를 반복 재생하고 파형과 환자 구조 시점의 앞뒤 위치로 이동할 수 있습니다.

	한 페이지 뒤로 이동		어떤 항목을 표시할 지 선택합니다. CPR 그래프 표시, 이벤트 목록에서 실제 시간 표시, 사용자 추가 이벤트 표시, 이벤트 마커 표시
	1초 뒤로 이동		ECG 그래프의 수직축 눈금 설정 (5 ~ 25mm/mV)
	기록 재생		ECG 및 CPR 그래프의 수평축 눈금 설정 (10 ~ 40mm/초)
	재생 멈춤		ECG 그래프의 수직축 눈금 설정 (1 ~ 3mm/g, $g = m/sec^2$)

	1초 앞으로 이동		클릭하면 별도의 창에서 파형 탭이 열립니다. 이 창을 최대화하면 기록을 전체 화면으로 볼 수 있습니다.
	한 페이지 앞으로 이동		포인터를 위로 끌어 올리면 확대해서 볼 수 있고 아래로 내리면 축소되어 보입니다. + 또는 - 버튼을 클릭하여 단계 별로 확대 또는 축소하십시오.
	구조 파형 인쇄		위치 포인터를 좌우로 끌어서 환자 구조의 다른 부분을 볼 수 있습니다.

사고 정보 보기 및 업데이트하기

구조 탭을 클릭합니다. 보고자 하는 구조를 선택합니다. **사고** 탭을 클릭합니다.

사고 보고서를 사용하여 환자의 연령, 성별, 및 구조에 대한 일반 정보를 추가하십시오.
AED가 연결되어 있지 않아도 이 정보를 수정 또는 저장할 수 있습니다.

양식을 작성하려면,

1. 직접 입력하거나 드롭다운 메뉴에서 선택하여 데이터를 업데이트 또는 추가하고,
2. 이 작업이 끝나면 **데이터베이스에 저장**을 클릭합니다.

사고 정보 및 구조 파형 인쇄

사고 및 파형 탭에서 표시되는 정보를 인쇄할 수 있습니다.

파형만을 인쇄하려면,



▲ 아이콘 표시줄 상의 **구조 | 파형 및 이벤트** 탭에 있는 **인쇄** 아이콘을 클릭합니다.

파형, 구조 이벤트 그리고 사고 정보를 인쇄하려면,

1. 구조 목록에 있는 환자 구조를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭합니다.
2. 구조 보고서 인쇄를 선택합니다.
3. 인쇄를 클릭합니다.

이벤트 메시지 검토

이벤트 로그 탭에서 AED 이벤트와 오류에 대한 상세 정보를 볼 수 있습니다.

AED는 시스템 자가 테스트 및 뚜껑을 열거나 닫는 것 등의 각기 다른 개별 작업이 이루어진 시간을 기록합니다.

1) **이벤트 로그:** AED에 기록된 모든 자가 테스트를 나열합니다.

2) **현재 오류:** AED에 의해 생성된 오류를 나열합니다.

요약 이벤트 로그 구조		
이벤트 로그		
시간	이벤트 ...	추가 정보
7/11/2013 1:17:51 PM (GMT)그레니치 표준시: 더블린, 에든버러, 리스본, 런던 (+J0DST)	자가 진단	진행 중입니다 완료
7/11/2013 1:19:41 PM (GMT)그레니치 표준시: 더블린, 에든버러, 리스본, 런던 (+J0DST)	자가 진단	진행 중입니다 완료
7/11/2013 1:19:44 PM (GMT)그레니치 표준시: 더블린, 에든버러, 리스본, 런던 (+J0DST)	자가 진단	진행 중입니다 완료
7/11/2013 1:20:08 PM (GMT)그레니치 표준시: 더블린, 에든버러, 리스본, 런던 (+J0DST)	자가 진단	진행 중입니다 완료
7/11/2013 1:20:22 PM (GMT)그레니치 표준시: 더블린, 에든버러, 리스본, 런던 (+J0DST)	자가 진단	진행 중입니다 완료
7/11/2013 1:22:16 PM (GMT)그레니치 표준시: 더블린, 에든버러, 리스본, 런던 (+J0DST)	자가 진단	진행 중입니다 완료
7/11/2013 1:22:35 PM (GMT)그레니치 표준시: 더블린, 에든버러, 리스본, 런던 (+J0DST)	자가 진단	진행 중입니다 완료
7/11/2013 1:23:00 PM (GMT)그레니치 표준시: 더블린, 에든버러, 리스본, 런던 (+J0DST)	자가 진단	진행 중입니다 완료
7/11/2013 1:31:14 PM (GMT)그레니치 표준시: 더블린, 에든버러, 리스본, 런던 (+J0DST)	자가 진단	진행 중입니다 완료
7/11/2013 1:32:01 PM (GMT)그레니치 표준시: 더블린, 에든버러, 리스본, 런던 (+J0DST)	자가 진단	진행 중입니다 완료
7/11/2013 1:32:05 PM (GMT)그레니치 표준시: 더블린, 에든버러, 리스본, 런던 (+J0DST)	자가 진단	진행 중입니다 완료
7/11/2013 1:32:18 PM (GMT)그레니치 표준시: 더블린, 에든버러, 리스본, 런던 (+J0DST)	자가 진단	진행 중입니다 완료
7/11/2013 1:34:32 PM (GMT)그레니치 표준시: 더블린, 에든버러, 리스본, 런던 (+J0DST)	자가 진단	진행 중입니다 완료
7/11/2013 1:34:50 PM (GMT)그레니치 표준시: 더블린, 에든버러, 리스본, 런던 (+J0DST)	자가 진단	진행 중입니다 완료
현재 오류		
시간	오류 ID	
5/6/2014 7:29:11 AM (GMT)그레니치 표준시: 더블린, 에든버러, 리스본, 런던	0x50505	
5/6/2014 7:29:10 AM (GMT)그레니치 표준시: 더블린, 에든버러, 리스본, 런던	0x50231	
5/5/2014 1:29:52 PM (GMT)그레니치 표준시: 더블린, 에든버러, 리스본, 런던	0x5022C	
4/30/2014 1:31:40 PM (GMT)그레니치 표준시: 더블린, 에든버러, 리스본, 런던	0x50201	
4/30/2014 1:28:43 PM (GMT)그레니치 표준시: 더블린, 에든버러, 리스본, 런던	0x80A	

AED 정보 인쇄 - AED 데이터 가져오기/내보내기

연결된 AED에서는 자가 테스트 검토, AED 구성 인쇄, AED 데이터 가져오기 및 내보내기를 할 수 있습니다.

AED 정보 인쇄

1. AED 목록에서 AED를 선택합니다. AED가 연결되지 않아도 됩니다.
2. **파일 | 보고서 생성 | AED 보고서 인쇄**를 선택합니다.

AED 데이터 가져오기 및 내보내기

이전에 저장된 AED 데이터 파일을 가지고 있다면 이 파일을 로드해서 AED Manager에서 볼 수 있습니다.

AED 데이터 파일을 가져오려면,

1. **파일 | 가져오기 | 파일에서 AED 데이터 가져오기** 선택.
2. 가져올 파일을 선택합니다.

가져온 AED가 연결 안 된 AED 목록 상에 나타납니다.

일체의 AED 데이터를 압축 파일 형식으로 내보낼 수도 있습니다. 이 파일은 추가 분석을 위해 다른 응용 프로그램에서도 사용할 수 있습니다.

AED 데이터를 내보내려면,

1. 연결된 또는 연결 안 된 목록에서 내보낼 AED를 선택합니다.
2. **파일** 메뉴를 선택하고, **내보내기 | 선택된 AED 데이터를 단일 파일로** 선택합니다.

ECG 파형 및 기록된 구조 이벤트를 포함한 모든 구조 관련 데이터가 하나의 압축 파일로 저장됩니다.

원격 AED 구성(관리자 전용)

AED Manager 컴퓨터로 가져가지 않고도 AED 구성을 해당 위치에서 업데이트할 수 있습니다. 하나의 USB 플래시 드라이브로 모든 AED 구성을 적용할 수 있습니다. 플래시 드라이브를 AED의 USB 포트에 연결하여 해당 위치에서 바로 AED를 업데이트하십시오. 플래시 드라이브를 연결하면, 선택한 구성 매개 변수가 AED에 복사됩니다.

새 구성으로 원격 AED를 업데이트하려면:

1. 연결됨 또는 연결되지 않음 목록에서 AED를 선택하십시오. 어떤 AED든 선택할 수 있습니다.

참고: 플래시 드라이브를 준비하려면 AED의 구성이 필요하므로 반드시 AED를 선택해야 합니다.

2. 컴퓨터에 USB 플래시 드라이브를 연결하십시오.
3. **파일 | 구성 업그레이드를 위한 USB 플래시 드라이브 준비**를 선택하십시오.
4. 표시되는 USB 플래시 드라이브 준비 창에서 플래시 드라이브를 선택하십시오.
주의! 포맷하면 플래시 드라이브의 모든 데이터가 삭제됩니다.
5. **다음**을 클릭하여 플래시 드라이브를 포맷(준비)하십시오.
6. 구성 창에서 원하는 매개 변수를 선택하십시오. 구성 대화 상자의 패널은 **요약 탭**에 있는 패널과 유사합니다.
7. 구성을 검토하십시오. 변경 사항이 완료되면 **저장**을 클릭하십시오. **저장**을 클릭하면 AED Manager가 구성 파일을 USB 플래시 드라이브에 기록합니다.
8. USB 포트에서 플래시 드라이브를 제거하십시오.



ZOLL Medical Corporation
269 Mill Road
Chelmsford, MA USA
01824-4105

Powerheart, STAR, Intellisense, Rescue Ready, RescueCoach, 및 RHYTHMx은
ZOLL Medical Corporation의 등록 상표입니다. Copyright © 2026 ZOLL Medical
Corporation. All Rights Reserved.

70-02075-19 C

