



Uporaba programa AED Manager

Copyright © 2026 ZOLL Medical Corporation. Sva prava pridržana.


O AED upravitelju

AED upravitelj medicinskim voditeljima, administratorima automatskog vanjskog defibrilatora (AVD) i medicinskim tehničarima hitne pomoći olakšava konfiguriranje AVD-ova Powerheart® G5 i pregledavanje spašavanja žrtava iznenadnog srčanog zastoja.

AED upravitelj omogućuje vam...	Pogledajte stranicu...
Odaberite audio i vizualne upute za spašavanje RescueCoach™ kako biste prilagodili potrebe obuke i jezik tipičnog korisnika*	stranica 9
Prilagodite niz aspekata protokola spašavanja, na primjer, trajanje i vrste kardiopulmonalne reanimacije te uvjete primjene električnog šoka*	stranica 9
Pregledajte događaje spašavanja, uključujući EKG pacijenta	stranica 13
Prilagodite informacije specifične za spašavanje te ih dodajte podacima koje je snimio AVD	stranica 16
Pogledajte samodijagnostiku i ostale poruke o događajima za svaki AVD	stranica 17
Izvesti spremljene podatke koji uključuju dob i spol pacijenta, kao i podatke o spašavanju za uporabu u drugim aplikacijama	stranica 18
Ispisivati i spremati PDF izvješća	stranica 18
Konfigurirati udaljene uređaje AED	stranica 19

Napomena: *Bilo koju postavku spašavanja može dodijeliti samo ovlašteno, obučeno medicinsko osoblje.

Pregled prozora AED upravitelja

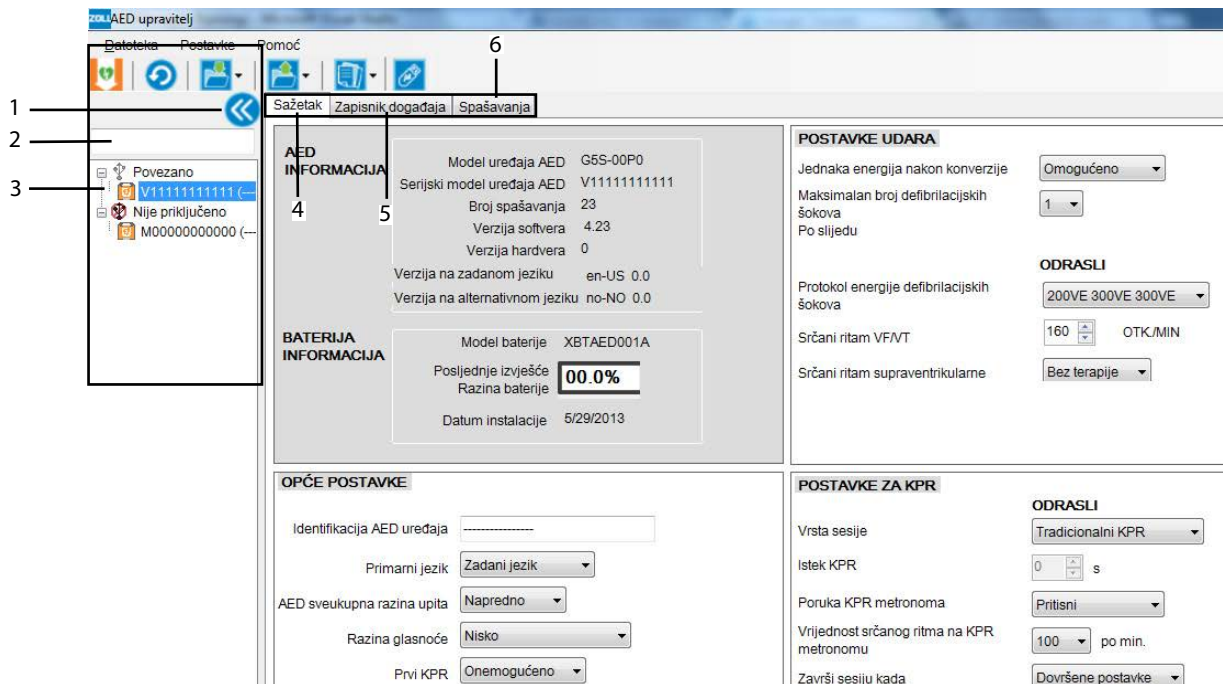

Popis AVD-a

- 1 Za skrivanje i prikaz popisa AVD-a pritisnite strelicu.
- 2 Pretražite okvir. Unesite naziv ili serijski broj AVD-a za prikaz na popisu.
- 3 Popis AVD-ova koji su bili ili su trenutno povezani s računalom. Odaberite AVD za prikaz informacija o njemu.
 - Pritisnite + za prikaz popisa povezanih i nepovezanih AVD-ova. Kada se popis proširi, pritisnite - za skrivanje popisa AVD-ova.

Kartice za konfiguraciju AVD-a i informacije

- 4 Opće informacije o AVD-u, uključujući naziv, vrstu i status baterije. Ovdje konfigurirajte postavke AVD-a.
- 5 Pogledajte poruke koje je spremio AVD.
- 6 Pogledajte snimke sesija spašavanja.

Instaliranje programa AED Manager

AED Manager ima podršku u sustavima Windows 10 i Windows 11.

Da biste instalirali AED Manager, otidite na web-stranicu ZOLL Product Materials, potražite „Software/AED Manager” i preuzmite instalacijsku .zip datoteku.

Pomoću funkcije Windows Extract All... izdvojite instalacijske datoteke.

Pronađite datoteku setup.exe i dvaput je kliknite.

Na nekim računalima instaliranje programa AED Manager rezultira upozorenjem sustava Windows Defender:



Odaberite opciju "More info" (Više informacija), a zatim "Run Anyway" (Ipak pokreni) kako bi se AED upravitelj nastavio instalirati.

Postupak instalacije obuhvaća upute i odabir jezika, pregled licenčnog ugovora i postavljanje administratorske lozinke. Ikona za AED Manager bit će postavljena na vašu radnu površinu.

Pokretanje programa AED Manager



Za otvaranje programa AED Manager:

Dvaput kliknite ikonu **AED Manager** na radnoj površini.

Kada se pojavi pozdravni zaslon, odaberite **Administrator** ili **Normalni korisnik**. Za korisnika **Administrator** morate unijeti lozinku.

- ▲ Administrator vam omogućuje ne samo pregled informacija o uređaju AED, već i promjenu i ažuriranje postavki uređaja AED.

Važno: administratorski pristup treba ograničiti na osobe s medicinskim kvalifikacijama i ovlaštenjem za mijenjanje protokola spašavanja i drugih terapijskih postavki uređaja AED.

- ▲ **Normalni korisnik** omogućuje vam samo pregled, izvoz i ispis informacija o uređaju AED.

Kliknite **Nastavi**.

Određivanje postavki AED upravitelja

Odaberite **Postavke | Preference**.

Na ploči **Općenito** odaberite sljedeće postavke:

- ▲ **Jezik:** Jezik na kojem želite upotrebljavati AED upravitelja.

Napomena: Ponovno pokrenite AED upravitelja kako bi se primijenio odabir jezika.

- ▲ **Lozinka:** ako ste AED Manager pokrenuli kao Administrator, možete kliknuti „Promjena lozinke” kako biste ažurirali lozinku za administratora.

Na ploči **Izvoz** odaberite mapu kako biste spremili izvoze podataka o spašavanju. Za odabir mape pritisnite **Pretraži**, a zatim navigirajte do mape koju želite upotrijebiti.

Prijenos podataka o AVD-u u AED upravitelja

Podatke o spašavanju i događajima možete iz jednog AVD-a ili više njih u *AED upravitelj* prenijeti pomoću USB izbrisivog memorijskog pogona ili izravno USB kabelom iz AVD-a. Pomoću memorijskih pogona možete uređaje AED ponovno konfigurirati na mjestu gdje se čuvaju umjesto da ih prenosite do računala.



UPOZORENJE! Mogućnost električnog udara i opasnost od požara.

Nemojte uključiti telefone ili neovlaštene priključke na utičnicu na ovoj opremi.



OPREZ Mogućnost gubitka podataka.

Nemojte uklanjati izbrisivi memorijski pogon ili isključivati AVD tijekom prijena podataka.

USB memorijski pogon

1. korak

Isključite elektrode za defibrilaciju.



2. korak


Spojte izbrisivi memorijski pogon na USB priključak.

- AVD kopira informacije na izbrisivi memorijski pogon.
- Nakon dovršetka AVD šalje upute za uklanjanje izbrisivog memorijskog pogona.



3. korak

Uklonite izbrisivi memorijski pogon.

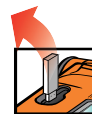

4. korak

Priključite elektrode na AVD i zatvorite poklopac.



Za prikaz podataka:

- ▲ Uključite izbrisivi memorijski pogon u USB priključak na računalu. Ako se otvori prozor preglednika Windows Explorer, zatvorite ga. Pokrenite *AED Manager*.

Svaki AVD sa podacima na pogonu prikazuje se na popisu AVD-a pod stavkom Nije priključeno. Možete pregledavati, ispisivati i izvoziti podatke na isti način kao i pomoću priključenog AVD-a.

USB kabel


1. korak

Isključite elektrode za defibrilaciju.



2. korak

Spojite USB kabel na USB priključak.

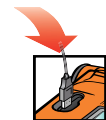

3. korak

Povežite drugi dio s USB priključkom računala. Ako se otvori prozor preglednika Windows Explorer, zatvorite ga.
AVD šalje upit Način komunikacije.



4. korak

Pokrenite *AED upravitelj*.

- AVD se prikazuje na popisu AVD-a, a podaci se kopiraju u bazu podataka AED upravitelja.



5. korak

Isključite USB kabel.

Nakon što isključite AVD, ikona će izmijeniti status **Povezano** u **Nije priključeno** na popisu AVD-a.



6. korak

Povežite elektrode.



Postavljanje parametara za AVD i spašavanje

Važno: za promjenu parametara spašavanja morate imati administratorski pristup. Prilikom pokretanja programa AED Manager prijavite se kao Administrator. Ako ste trenutno prijavljeni kao Korisnik, izađite i ponovno pokrenite.

Za prikaz trenutačne konfiguracije AVD-a pritisnite njegovu ikonu ili njegov naziv na popisu AVD-a.

Na kartici **Sažetak** možete prilagoditi niz atributa svakog AVD-a u vašem inventaru. Ploče na prozoru Sažetak postavljaju različite značajke AVD-a:

Opće postavke	Jezik i upute za spašavanje	stranica 9
Postavke vremena	Datum i vrijeme sata AVD-a	stranica 10
Postavke udara	Postavke terapije defibrilacijom	stranica 10
Postavke za KPR	Protokoli kardiopulmonalne reanimacije za terapiju odraslih i pedijatrijskih pacijenata	stranica 11
Postavke KPR uređaja	Granice za upute za kardiopulmonalnu reanimaciju ako su za AVD pričvršćene elektrode za odrasle pacijente s pomoći za kardiopulmonalnu reanimaciju.	stranica 12

Nakon dovršetka postavljanja parametara pritisnite ikonu **Spremi konfiguraciju** ili **Spremi na AED** na alatnoj traci. AED upravitelj šalje konfiguraciju priključenom AVD-u.

Za vraćanje svih postavki konfiguracije na svim karticama konfiguracije na njihove prethodne vrijednosti nakon zadnjeg spremanja, pritisnite ikonu **Poništi sve promjene** na alatnoj traci.

Za vraćanje postavki AVD-a na vrijednosti koje je imao pri isporuci pritisnite **Vrati tvorničke postavke** i spremite.

Opće postavke: Postavljanje jezika i uputa

Upotrijebite ploču **OPĆE POSTAVKE** kako biste postavili ove postavke.

Postavka	Opis
Identifikacija AED uređaja	Naziv AVD-a kako se prikazuje na popisu AVD-a i u izvješćima. Naziv može sadržavati najviše 16 znakova. Upotrijebite bilo koji od sljedećih znakova: A – Z, a – z, 0 – 9, crtu, razmak. Ako upravljate s više AVD-ova, odaberite konvenciju imenovanja kao što je konvencija na temelju lokacije jedinica.
Primarni jezik (Samo za modele s mogućnošću odabira dva jezika)	Odaberite jezik koji AVD upotrebljava dok je poklopac otvoren. Korisnik se može prebaciti na drugi navedeni jezik tijekom spašavanja.
AED sveukupna razina upita	Osnovno, Standardno ili Napredno Opise i upute koji se upotrebljavaju na svakoj razini potražite u <i>Priručniku za korisnike Powerheart G5</i> .
Razina glasnoće	Nisko – za ured ili ostala tiha područja. Maksimalno – upotreba na otvorenom ili u bučnim prostorima.
Prvi KPR	AVD može započeti sa spašavanjem analizirajući EKG pacijenta ili dajući upute spasitelju da započne s kardiopulmonalnom reanimacijom. Omogućeno – AVD navodi upute da se najprije izvrši kardiopulmonalna reanimacija. Onemogućeno – AVD prvo analizira EKG pacijenta.
Poruka o pokretanju	AVD šalje početnu poruku dok je poklopac otvoren. Bez poruke: AVD ne prikazuje upute za pokretanje. U ostalim slučajevima odaberite jednu od sljedećih uputa: Nazovite 911 Nazovite hitnu službu

Postavke vremena: Postavljanje sata

Za postavljanje sata AVD-a:

1. U izborniku **Vremenska zona / UTC odmak** odaberite svoju vremensku zonu.
2. Pritisnite **Sinkroniziraj datum/vrijeme**.

Napomena: vrijeme postavljeno na uređaju G5 podešeno je na ljetno računanje vremena.

Postavke šoka

AVD može voditi različite protokole za elektrode za odrasle i pedijatrijske pacijente.

Postavka	Opis
Jednaka energija nakon konverzije	Ako je opcija omogućena, AVD isporučuje prethodnu razinu energije defibrilacije sljedeći put kada je potreban električni šok u slučaju da ritam pacijenta postane ritam bez šoka.
Maksimalan broj defibrilacijskih šokova po slijedu	Broj električnih šokova koji se može isporučiti prije nego što AVD prijeđe u način kardiopulmonalne reanimacije.
Protokol energije defibrilacijskih šokova	Odaberite protokol za energiju koju isporučuje električni šok. Ako su na AVD priključene elektrode za defibrilaciju za pedijatrijske pacijente, upotrebljava broj naveden u polju Pedijatrijski.

Postavke kardiopulmonalne reanimacije: Postavljanje parametara spašavanja

AVD omogućuje sastavljanje različitih protokola spašavanja za odrasle i pedijatrijske pacijente.

Postavka	Opis
Vrsta sesije	Klasična reanimacija (kompresije i upuhivanja) ili Samo kompresije . Isključivo masaža srca upotrebljava samo postavke Istek KPR i metronomne postavke.
Istek KPR	Vrijeme trajanja svake sesije kardiopulmonalne reanimacije u sekundama. Mjerač vremena na AVD-u prati preostalo vrijeme.
Poruka KPR metronoma	Označava brzinu kako bi spasitelj prilagodio kompresije prsa. Pritisni – govorna uputa "pritisnuti" koja se daje pri odabranoj metronomskoj brzini kardiopulmonalne reanimacije. Ping – AVD daje mehanički metronomni signal pri metronomnoj brzini kardiopulmonalne reanimacije. Bez metronoma – nema zvuka
Vrijednost srčanog ritma na KPR metronomu	Brzina metronomne upute u otkucajima u minuti.
Završi sesiju kada	Ova postavka određuje ukupno vrijeme sesije. Dovršeni ciklusi – sesija kardiopulmonalne reanimacije završava kada broj skupova kardiopulmonalne reanimacije istekne. Svaki skup uključuje broj kompresija po skupu te broj udisaja po skupu. Istek vremena – sesija završava kada mjerač vremena kardiopulmonalne reanimacije dosegne nulu. Posljednji skup kompresija i udisaja može se samo djelomično dovršiti.
Broj pokušaja	Ako se primjenjuje klasična reanimacija i dovršeni ciklusi, pokazuje koliko će puta spasilac dobiti uputu da primijeni kombinaciju kompresija i upuhivanja.
Udisaji po pokušaju	Broj udisaja koje je potrebno izvršiti prije početka drugog kruga kompresija.
Srčana masaža po pokušaju	Broj kompresija prsa koje je potrebno izvršiti prije udisaja.

Postavke uređaja za kardiopulmonalnu reanimaciju

Postavljanje granica za uređaj za kardiopulmonalnu reanimaciju

Da biste postavili pragove za upute za reanimaciju u spašavanjima koja se koriste uređajem za reanimaciju, izmijenite postavke u oknu **POSTAVKE uređaja za reanimaciju**.

Postavka	Opis
Ritam masaže srca (srčana masaža / minuta)	Minimum: Ako spasitelj izvršava kompresiju pri ovoj brzini, AVD šalje upute "Pritisni brže". Maksimalna vrijednost: Ako spasitelj izvršava kompresiju pri ovoj brzini, AVD šalje upute "Pritisni sporije".
Dubina srčane masaže (cm)	Minimum: Ako spasitelj ne dosegne ovu dubinu kompresije, AVD šalje upute "Pritisni jače". Maksimalna vrijednost: Ako spasitelj pritišće do veće dubine od ove, AVD šalje upute "Pritisni mekše".

Pregled spašavanja

Kartica **Sažetak** ispod kartice **Spašavanja** prikazuje vrijeme, broj primijenjenih električnih šokova i trajanje spašavanja.

Centar za spašavanje	Sažetak	Snimka stanja uređaja AED
----------------------	---------	---------------------------

Sažetak postupka spašavanja

Informacija o incidentu

ID incident	767_1846_46
Datum/vrijeme	4/30/2014 1:00:33 PM (+-)DST (ljetno računanje vremena)
Broj defibrilacijskih šokova	0
Trajanje postupka spašavanja	693 sekunde

Pogledajte karticu **Snimka stanja uređaja AED** kako biste pregledali sve postavke programirane na AVD-u pri spašavanju. Opise postavki potražite u odjeljku *Postavljanje parametara za AVD i spašavanje* na stranici 8 – 12.

Pregled valnog oblika EKG-a i događaja spašavanja

Pritisnite karticu **Valni oblik i događaji** ispod kartice **Centar za spašavanje**.


Popis događaja prikazuje sve radnje koje AVD izvršava tijekom spašavanja.

Grafikon ispod popisa događaja prikazuje snimku EKG pacijenta i kardiopulmonalnu reanimaciju pomoću uređaja za kardiopulmonalnu reanimaciju s događajima spašavanja.

- ▲ Odaberite stavku na popisu događaja.
Grafikon se pomiče na mjesto spašavanja kada se događaj zbio.
- ▲ Povucite i otpustite miš preko valnog oblika kako biste se kronološki pomicali naprijed i natrag.
- ▲ Valnom obliku dodajte bilješke. Desnom tipkom miša pritisnite grafikon na mjestu gdje želite da se prikaže bilješka. U kontekstualnom izborniku odaberite opciju **Dodaj korisničku primjedb**u. U dijaloškom okviru **Stvori/uredi događaj** unesite naziv i komentar, a zatim pritisnite **Spremi**.
- ▲ Upotrijebite kontrole reproduktora za reprodukciju spašavanja u stvarnom vremenu (jedna sekunda spašavanja reproducira se jednu sekundu) te se pomičite naprijed i natrag kroz valne oblike i spašavanje.



Pomaknite se natrag
za jednu stranicu

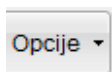



Odaberite stavke za prikaz:
prikaz grafikona
kardiopulmonalne reanimacije,
prikaz stvarnog vremena na
popisu događaja, prikaz
događaja koje je dodao
korisnik, prikaz markera
događaja



Pomaknite se natrag
za jednu sekundu



Postavite okomito mjerilo
grafikona EKG-a
(5 – 25 mm/mV)

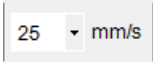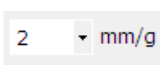	Reproducirajte snimku		Postavite vodoravno mjerilo EKG-a i grafikona kardiopulmonalne reanimacije (10 – 40 mm/sekundi)
	Zaustavite reprodukciju		Postavite okomito mjerilo grafikona kardiopulmonalne reanimacije (1- 3 mm/g; $g = m/s^2$)
	Pomaknite se naprijed jednu sekundu		Pritisnite kako biste otvorili karticu za valni oblik u zasebnom prozoru. Ovaj prozor možete povećati kako biste pogledali snimku na punom zaslonu.
	Pomaknite se naprijed za jednu stranicu		Za povećanje povucite pokazivač prema gore i prema dolje za smanjenje. Kliknite tipku + ili – za zumiranje korak po korak.
	Ispišite valni oblik spašavanja		Povucite pokazivač ulijevo i udesno za prikaz različitih dijelova spašavanja.

Pregled i ažuriranje informacija o slučaju

Pritisnite karticu **Spašavanja**. Odaberite spašavanje koje želite pogledati. Pritisnite karticu **Incidenti**.

Pomoću obrasca za štetne događaje dodajte dob i spol pacijenta te opće informacije o spašavanju. AVD ne mora biti priključen kako bi se informacije izmijenile ili spremile.

Za ispunjavanje obrasca:

1. na padajućem izborniku unesite ili odaberite podatke za ažuriranje ili dodavanje.
2. Nakon dovršetka pritisnite **Spremi u bazu podataka**.

Ispisivanje podataka o slučaju i valnih oblika spašavanja

Informacije na karticama **Incident** i **Valni oblik** možete ispisati.

Za ispis samo valnog oblika:



- ▲ Pritisnite ikonu **Ispiši** ispod kartice **Spašavanja | Valni oblik i događaji** na traci ikone.

Za ispis valnog oblika, događaja spašavanja i informacija o slučaju:

1. desnom tipkom miša pritisnite spašavanje na popisu spašavanja.
2. Odaberite **Ispiši izvještaj o spašavanju**.
3. Pritisnite **Ispiši**.

Pregled poruka o događajima

Na kartici **Zapisnik događaja** možete pogledati pojedinosti o događajima AVD-a i pogreške. AVD bilježi vremena događanja različitih radnji kao što su samodijagnostika sustava te otvaranje i zatvaranje poklopca.

- 1) **Zapisnik događaja:**
Navodi sve samodijagnostike koje je zabilježio AVD.
- 2) **Trenutne pogreške:**
Navodi pogreške koje je stvorio AVD.

SažetakZapisnik događajaSpašavanja

Zapisnik događaja

Vrijeme
7/11/2013 1:17:51 PM (GMT)Srednje vrijeme po Greenwich: Dublin, Edinburgh, Lisabon, London (+JST (ljeto računanje vrem
7/11/2013 1:19:41 PM (GMT)Srednje vrijeme po Greenwich: Dublin, Edinburgh, Lisabon, London (+JST (ljeto računanje vrem
7/11/2013 1:19:44 PM (GMT)Srednje vrijeme po Greenwich: Dublin, Edinburgh, Lisabon, London (+JST (ljeto računanje vrem
7/11/2013 1:20:08 PM (GMT)Srednje vrijeme po Greenwich: Dublin, Edinburgh, Lisabon, London (+JST (ljeto računanje vrem
7/11/2013 1:20:22 PM (GMT)Srednje vrijeme po Greenwich: Dublin, Edinburgh, Lisabon, London (+JST (ljeto računanje vrem
7/11/2013 1:22:16 PM (GMT)Srednje vrijeme po Greenwich: Dublin, Edinburgh, Lisabon, London (+JST (ljeto računanje vrem
7/11/2013 1:22:36 PM (GMT)Srednje vrijeme po Greenwich: Dublin, Edinburgh, Lisabon, London (+JST (ljeto računanje vrem
7/11/2013 1:23:00 PM (GMT)Srednje vrijeme po Greenwich: Dublin, Edinburgh, Lisabon, London (+JST (ljeto računanje vrem
7/11/2013 1:31:14 PM (GMT)Srednje vrijeme po Greenwich: Dublin, Edinburgh, Lisabon, London (+JST (ljeto računanje vrem
7/11/2013 1:32:01 PM (GMT)Srednje vrijeme po Greenwich: Dublin, Edinburgh, Lisabon, London (+JST (ljeto računanje vrem
7/11/2013 1:32:05 PM (GMT)Srednje vrijeme po Greenwich: Dublin, Edinburgh, Lisabon, London (+JST (ljeto računanje vrem
7/11/2013 1:32:18 PM (GMT)Srednje vrijeme po Greenwich: Dublin, Edinburgh, Lisabon, London (+JST (ljeto računanje vrem
7/11/2013 1:33:30 PM (GMT)Srednje vrijeme po Greenwich: Dublin, Edinburgh, Lisabon, London (+JST (ljeto računanje vrem

Trenutne pogreške

Vrijeme	ID pogr...
5/6/2014 7:29:46 AM (GMT)Srednje vrijeme po Greenwich: Dublin, Edinburgh, Lisabon, London	0x908
5/6/2014 7:29:11 AM (GMT)Srednje vrijeme po Greenwich: Dublin, Edinburgh, Lisabon, London	0x50505
5/6/2014 7:29:10 AM (GMT)Srednje vrijeme po Greenwich: Dublin, Edinburgh, Lisabon, London	0x50231
5/6/2014 1:29:52 PM (GMT)Srednje vrijeme po Greenwich: Dublin, Edinburgh, Lisabon, London	0x5022C
4/30/2014 1:31:40 PM (GMT)Srednje vrijeme po Greenwich: Dublin, Edinburgh, Lisabon, London	0x50201
4/30/2014 1:28:43 PM (GMT)Srednje vrijeme po Greenwich: Dublin, Edinburgh, Lisabon, London	0x80A

Ispis informacija o uređaju AED – uvoz/izvoz podataka o uređaju AED

Priključen AVD omogućuje pregled samodijagnostike, ispis konfiguracije, uvoz i izvoz podataka AVD-a.

Ispis informacija AVD-a

1. Odaberite AVD s popisa AVD. Ne treba biti priključen.
2. Odaberite **Datoteka | Generiraj izvješće | Ispis AED izvješća**.

Uvoz i izvoz podataka AVD-a

Ako ste prethodno spremili podatkovnu datoteku AVD-a, tu datoteku možete učitati za prikaz u AED upravitelju.

Za uvoz podatkovne datoteke AVD:

1. Odaberite **Datoteka | Uvoz | Uvoz podataka AED-a iz datoteke**.
2. Odaberite datoteku za uvoz.

Uvezeni AVD prikazuje se na popisu nepriključenih AVD-ova.

Možete izvesti cijeli skup podataka AVD u obliku komprimirane datoteke. Ta datoteka može se upotrebljavati s ostalim aplikacijama za daljnju analizu.

Za izvoz podataka AVD-a:

1. Odaberite AVD za izvoz s popisa priključenih ili nepriključenih AVD-ova.
2. Odaberite izbornik **Datoteka, odaberite Izvoz | Odabrani AED podaci za jednu datoteku**.

Sva spašavanja, uključujući valni oblik EKG- a i snimljeni događaji spašavanja spremaju se u jednu komprimiranu datoteku.

Konfiguriranje udaljenih uređaja AED (samo na administratorskoj razini)

Konfiguraciju uređaja AED možete ažurirati na njihovim lokacijama umjesto da ih prenosite do računala s programom AED Manager. Pomoću jednog USB memorijskog pogona možete konfigurirati cijelu zalihu uređaja AED. Ažurirajte uređaje AED na licu mjesta priključivanjem USB pogona u USB priključak uređaja AED. Kada priključite USB pogon, AED kopira odabrane konfiguracijske parametre.

Za ažuriranje udaljenih uređaja AED novom konfiguracijom:

1. Odaberite AED s popisa povezanih ili nepovezanih uređaja. Možete odabrati bilo koji AED.
Napomena: morate odabrati jedan AED jer je njegova konfiguracija potrebna za pripremu memorijskog pogona.
2. Spojite USB memorijski pogon s računalom.
3. Odaberite **Datoteka | Priprema USB pogona za nadogradnju konfiguracije**.
4. Odaberite USB pogon u prozoru za pripremu USB memorijskog pogona koji će se pojaviti.
OPREZ! Formatiranjem se brišu svi podaci s memorijskog pogona.
5. Kliknite **Dalje** kako biste formatirali (pripremili) memorijski pogon.
6. U prozoru za konfiguraciju odaberite željene parametre. Okna u dijaloškom okviru za konfiguriranje slična su onima na kartici **Sažetak**.
7. Pregledajte konfiguraciju. Kliknite **Spremi** ako ste dovršili promjene. Nakon što kliknete **Spremi**, AED Manager zapisuje konfiguracijske datoteke na USB memorijski pogon.
8. Izvadite memorijski pogon iz USB priključka.



ZOLL Medical Corporation
269 Mill Road
Chelmsford, MA USA
01824-4105

Powerheart, STAR, Intellisense, Rescue Ready, RescueCoach i RHYTHMx zaštitni su znakovi tvrtke ZOLL Medical Corporation. Copyright © 2026 ZOLL Medical Corporation. Sva prava pridržana.

70-02075-39 C

