



AED Yöneticisinin Kullanılması

Telif Hakkı © 2026 ZOLL Medical Corporation. Tüm Hakları Saklıdır.

AED Yöneticisi Hakkında

AED Yöneticisi; Tıbbi Direktörlerin, Otomatik Harici Defibrilatör (AED) yöneticilerinin ve acil servis tıbbi teknisyenlerinin Powerheart® G5 AED'leri yapılandırmasına ve ani kardiyak arrest olguları için gerçekleştirilecek kurtarma olaylarını gözden geçirmesine yardımcı olur.

AED Yöneticisi ile yapabilecekleriniz...	Bkz. sayfa...
RescueCoach™ sesli ve görsel kurtarma uyarılarını tipik bir kullanıcının rehberlik gerekliliklerine ve anadiline uygun olacak şekilde seçme*	sayfa 9
Bir kurtarma protokolünün çeşitli parametrelerini özelleştirme, örn. CPR uzunlukları ve tipleri ve şok verilebilecek durumlar*	sayfa 9
Hastanın EKG'si de dahil olmak üzere kurtarma olaylarını gözden geçirme	sayfa 13
Bir AED tarafından kaydedilen verileri özelleştirin ve kurtarmaya özel bilgiler ekleyin	sayfa 16
Her AED'nin otomatik test mesajlarını ve diğer olay mesajlarını görüntüleme	sayfa 17
Hastanın yaş ve cinsiyetinin yanı sıra kurtarma verilerini de içeren kaydedilmiş verileri diğer uygulamalarda kullanılmak üzere dışa aktarma	sayfa 18
PDF Raporlarını yazdırma ve kaydetme	sayfa 18
Uzaktan Erişimli AED'leri Yapılandırma	sayfa 19

Not: *Tüm kurtarma ayarları yalnızca yetkili, eğitimli tıbbi personel tarafından gerçekleştirilmelidir.

AED Yöneticisi penceresine genel bakış

1. AED listesini gizlemek veya göstermek için oka tıklayın.

2. Arama kutusu. Listede gösterilmesini istediğiniz AED'nin adını veya seri numarasını yazın.

3. Bilgisayara daha önce bağlanmış olan veya halihazırda bağlı durumda olan AED'lerin listesi. Bilgilerini görüntülemek istediğiniz AED'yi seçin.

4. Ad, tip ve batarya durumu gibi AED hakkındaki genel bilgiler. AED ayarlarını burada yapılandırabilirsiniz.

5. AED tarafından kaydedilen mesajları görüntüleyin.

6. Kurtarma oturumlarının kayıtlarını görüntüleyin.

AED listesi

- 1 AED listesini gizlemek veya göstermek için oka tıklayın.
- 2 Arama kutusu. Listede gösterilmesini istediğiniz AED'nin adını veya seri numarasını yazın.
- 3 Bilgisayara daha önce bağlanmış olan veya halihazırda bağlı durumda olan AED'lerin listesi. Bilgilerini görüntülemek istediğiniz AED'yi seçin.
 - Bağlı olan veya olmayan AED'lerin listesini görüntülemek için + simgesine tıklayın. Liste genişletilmiş durumdayken AED listesini gizlemek için - simgesine tıklayın.

AED yapılandırma ve bilgi sekmeleri

- 4 Ad, tip ve batarya durumu gibi AED hakkındaki genel bilgiler. AED ayarlarını burada yapılandırabilirsiniz.
- 5 AED tarafından kaydedilen mesajları görüntüleyin.
- 6 Kurtarma oturumlarının kayıtlarını görüntüleyin.

AED Yöneticisinin Kurulumu

AED Yöneticisi Windows 10 ve Windows 11 işletim sistemlerinde desteklenmektedir.

AED Yöneticisini yüklemek için ZOLL Ürün Materyalleri Web Sitesine gidin, Yazılım/AED yöneticisi araması yapın ve kurulum .zip dosyasını indirin.

Windows'un "Tümünü Çıkar..." seçeneğini kullanarak kurulum dosyalarını çıkarın.

setup.exe dosyasını bulun ve üzerine çift tıklayın.

Bazı bilgisayarlarda AED Yöneticisinin yüklenmesi Windows Defender'ın bir uyarı vermesine neden olur:



AED Yöneticisi'nin devam etmesi için "More info" (Daha fazla bilgi) ögesini ve ardından "Run anyway" (Yine de çalıştır) ögesini seçin.

Kurulum süreci otomatik olarak gerçekleşir ve dil seçimi, lisans sözleşmesinin incelenmesi ve yönetici şifresinin belirlenmesini içerir. Masaüstünüze AED Yöneticisi simgesi yerleştirilir.

AED Yöneticisinin Çalıştırılması



AED Yöneticisini açmak için:

Masaüstündeki **AED Yöneticisi** simgesine çift tıklayın.

Açılış ekranı görüldüğünde **Yönetici** veya **Normal Kullanıcı** seçeneklerinden birini seçin. **Yönetici** seçeneği için şifre girmeniz gerekmektedir.

- ▲ Yönetici seçeneği yalnızca AED bilgilerini görüntülemenizi değil, aynı zamanda AED ayarlarını değiştirip güncellemenizi de sağlar.

Önemli: Yönetici düzeyindeki erişim, yalnızca tıbbi eğitim almış ve AED'nin kurtarma protokollerinde veya diğer tedavi ayarlarında değişiklik yapma yetkisine sahip kişilerle sınırlandırılmalıdır.

- ▲ **Normal Kullanıcı** seçeneği AED bilgilerini yalnızca görüntülemenizi, dışa aktarmanızı ve yazdırmanızı sağlar.

Devam Et ögesine tıklayın.

AED Yöneticisi uygulama tercihlerini ayarlama

Ayarlar | Tercihler ögesini seçin.

Genel panelde aşağıdaki tercihleri ayarlayın:

- ▲ **Dil:** AED Yöneticisi'nin kullanılacağı dil.

Not: Dil seçiminin uygulanması için AED Yöneticisi'ni yeniden başlatın.

- ▲ **Şifre:** AED Yöneticisini Yönetici seçeneği ile başlattıysanız, Şifre Değiştir ögesine tıklayıp Yönetici şifresini güncelleyebilirsiniz.

Dışa Aktar panelinde, dışa aktarılan kurtarma verilerinin kaydedileceği klasörü seçin. Bir klasör seçmek için **Göz at**'a tıklayın ve ardından kullanmak istediğiniz klasöre gidin.

AED verilerini AED Yöneticisi'ne aktarma

Kurtarma ve olay verilerini USB flash sürücüsü kullanarak bir veya birden fazla AED'den ya da doğrudan USB kablosu kullanarak bir AED'den *AED Yöneticisi*'ne aktarabilirsiniz. Ayrıca AED cihazlarını bilgisayara taşımak yerine bulundukları yerde yeniden yapılandırmak için flash diskler de kullanabilirsiniz.



UYARI! Elektrik çarpması ve yangın tehlikesi.

Bu ekipmanın üzerindeki sokete hiçbir telefon veya onay verilmeyen konnektör bağlamayın.



DİKKAT. Muhtemel veri kaybı.

Veri aktarımının gerçekleştirildiği sırada flash sürücüsünü kaldırmayın veya AED'nin bağlantısını kesmeyin.

USB flash disk

Adım 1

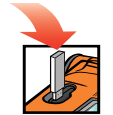
Defibrilasyon pedlerinin bağlantısını kesin.



Adım 2

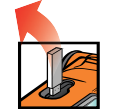
Flash sürücüsünü USB portuna takın.

- AED, bilgileri flash sürücüsüne kopyalar.
- İşlem tamamlandığında AED, flash sürücüsünü kaldırmanızı ister.



Adım 3

Flash sürücüsünü kaldırın.



Adım 4

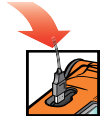
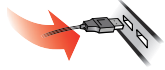
Pedleri AED'ye bağlayıp kapağı kapatın.



Verileri görüntülemek için:

- ▲ Flash sürücüsünü bilgisayardaki bir USB portuna takın. Bir Windows Explorer penceresi açılırsa bu pencereyi kapatın. *AED Yöneticisi*ni başlatın.
- Sürücüde kendisiyle ilgili veri bulunan her AED, AED listesinde Bağlı Değil ögesinin altında görüntülenir. Bu verileri tıpkı bağlı bir AED için yaptığınız gibi görüntüleyebilir, yazdırabilir ve dışa aktarabilirsiniz.

USB kablolu

Adım 1	Defibrilasyon pedlerinin bağlantısını kesin.	
Adım 2	USB kablosunu USB portuna bağlayın.	
Adım 3	Diğer ucunu bilgisayarın USB portuna bağlayın. Bir Windows Explorer penceresi açılırsa bu pencereyi kapatın. AED'de "İletişim Modu" ibaresi görüntülenir.	
Adım 4	<i>AED Yöneticisi</i> 'ni başlatın. AED, AED listesinde görünür ve veriler AED Yöneticisi'nin veritabanına kopyalanır.	
Adım 5	USB kablusunun bağlantısını kesin. AED'nin bağlantısı kesildikten sonra AED listesindeki simgesi Bağlı yerine Bağlı Değil olarak değişir.	
Adım 6	Pedleri bağlayın.	

AED ve kurtarma parametrelerini ayarlama

Önemli: Kurtarma parametrelerini değiştirmek için Yönetici erişimine sahip olmanız gerekir. AED Yöneticisini başlatırken Yönetici olarak oturum açın. Hâlihazırda Kullanıcı olarak çalıştırıyorsanız kapatıp yeniden başlatın.

Bir AED'nin mevcut yapılandırmasını görüntülemek için AED listesinde simgesine veya adına tıklayın.

Özet sekmesinin altında, envanterinizdeki her AED'nin birçok öz niteliğini özelleştirebilirsiniz. Özet penceresindeki paneller, AED'nin farklı özelliklerini ayarlamanızı sağlar:

Genel ayarlar	Dil ve kurtarma uyarıları	sayfa 9
Saat ayarları	AED saatindeki tarih ve saat	sayfa 10
Şok ayarları	Defibrilasyon tedavisi ayarları	sayfa 10
CPR ayarları	Yetişkin ve Pediyatrik tedavisi için CPR protokolleri	sayfa 11
CPR Cihazı ayarları	CPR Cihazı destekli yetişkin pedleri AED'ye bağlandığında kullanılacak CPR uyarılarına ilişkin eşik değerleri.	sayfa 12

Parametreleri ayarlamayı tamamladıktan sonra **Yapılandırmayı Kaydet**'e veya **AED'ye Kaydet** araç çubuğu simgesine tıklayın. AED Yöneticisi bu yapılandırmayı bağlı AED'ye gönderir.

Tüm yapılandırma sekmelerinde en son kayıt işleminden beri değiştirilmiş olan tüm yapılandırma ayarlarını orijinal değerlerine geri döndürmek için **Tüm Değişiklikleri Geri Al** araç çubuğu simgesine tıklayın.

AED'nin ayarlarını fabrika değerlerine geri döndürmek için **Fabrika Varsayılan Değerlerini Yeniden Yükle**'ye tıklayıp kaydedin.

Genel Ayarlar: Dili ve uyarıları ayarlama

Aşağıdaki tercihleri ayarlamak için **GENEL AYARLAR** panelini kullanın.

Tercih	Açıklama
AED Tanımlama	AED listesinde ve raporlarda görünen AED adı. Ad en fazla 16 karakter uzunluğunda olabilir. Şu karakterleri kullanın: A-Z, a-z, 0-9, tire, boşluk. Birden fazla AED'yi yönetiyorsanız bir adlandırma kuralı belirleyin, örneğin ünitelerin konumuna bağlı bir adlandırma kuralı belirleyebilirsiniz.
Birincil Dil (Yalnızca çift dilli modeller için)	AED'nin kapağı açıldığında kullanacağı dili seçin. Kullanıcı, kurtarma işlemi sırasında listede yer alan diğer bir dile geçiş yapabilir.
AED Genel Uyarı Düzeyi	Temel, Standart veya Gelişmiş Her düzeyde kullanılan açıklamalar ve uyarılar için bkz. <i>Powerheart G5 Kullanım Kılavuzu</i> .
Ses Düzeyi	Düşük: Ofiste veya diğer sessiz alanlarda kullanın. Maksimum: Dış mekânlarda veya gürültülü alanlarda kullanın.
Önce CPR	AED, hastanın EKG'sini analiz ederek veya kurtarıcıya CPR'ye başlaması talimatını vererek kurtarma işlemini başlatabilir. Etkin: AED önce CPR'nin gerçekleştirilmesi için uyarılar verir. Devre Dışı: AED önce hastanın EKG'sini analiz eder.
Başlatma Uyarısı	AED, kapak açıldığında ilk uyarıyı verir. Uyarı Yok: AED, başlatma uyarısı vermez. Bu durumda şu uyarılardan birini seçin: 112'yi Arayın (Avustralya için 000'ı arayın) Acil servisi arayın

Saat Ayarları: Saati ayarlama

AED'nin saatini ayarlamak için:

1. **Saat Dilimi/UTC Farkı** menüsünden saat diliminizi seçin.
2. **Tarihi/Saati Eşleştir**'e tıklayın.

Not: G5 cihazında ayarlanan saat Yaz Saati Uygulamasına göre ayarlanmıştır

Şok Ayarları

AED, yetişkin ve pediatrik pedler için farklı protokoller saklayabilir.

Tercih	Açıklama
Dönüşümden Sonra Aynı Enerji	Bu seçenek etkinleştirildiğinde hastanın ritmi şok verilemez ritme dönerse AED, şoka gerek duyulan bir sonraki durumda önceki defibrilasyon enerjisini uygular.
İşleme Göre Maksimum Şok	AED, CPR moduna girmeden önce uygulanabilecek şok sayısı.
Şok Enerjisi Protokolü	Bir şok ile uygulanacak enerjinin protokolünü seçin. AED'ye pediatrik defibrilasyon pedleri bağlıysa Pediatrik alanındaki sayı kullanılır.

CPR Ayarları: Kurtarma parametrelerini ayarlama

AED yetişkinler ve çocuklar (pediyatrik) için farklı kurtarma protokolleri sağlayabilir.

Tercih	Açıklama
Oturum Tipi	Geleneksel CPR (kompresyon ve suni solunum) veya Yalnızca kompresyon. Yalnızca bastırma , yalnızca CPR Zaman Aşımı ve metronom ayarlarını kullanır.
CPR Zaman Aşımı	Saniye cinsinden her CPR'nin sürdüğü süredir. AED'deki geri sayım sayacı kalan süreyi gösterir.
CPR Metronom Uyarısı	Kurtarıcının göğüs bastırmaları için uyması gereken hızı belirler. Baskı Uygulayın: Seçilen CPR Metronom Hızında verilen sesli "baskı uygulayın" uyarısı. Ping: AED, CPR Metronom Hızında bir mekanik metronom sesi çalar. Metronom Yok: Ses çalınmaz
CPR Metronom Hızı	Dakika başına kalp atışı cinsinden metronom uyarısının hızı.
Şu durumda oturumu sonlandır:	Bu tercih bir oturumun toplam süresini belirler. Setler Tam: CPR setlerinin sayısı tamamlandığında CPR oturumu sonlandırılır. Her set; sete göre bastırma ve sete göre soluk alma sayısını içerir. Süre Sona Erdiğinde: CPR sayacı sıfıra ulaştığında oturum sonlandırılır. Son bastırma ve soluk alma seti sadece kısmen tamamlanmış olabilir.
Set Sayısı	Geleneksel CPR ve Setler Tam yöntemlerinin kullanılması durumunda, kompresyon ve suni solunum kombinasyonunu gerçekleştirmesi için kullanıcıya verilen komut sayısı.
Sete göre soluk alma sayısı	Sonraki bastırma turuna başlanmadan önce verilecek soluk alma uyarılarının sayısı.
Sete göre bastırma	Soluk alma uyarısı verilmeden önce verilecek göğüs bastırma uyarılarının sayısı.

CPR Cihazı Ayarları: CPR Cihazı eşik değerlerini ayarlama

CPR Cihazının kullanıldığı kurtarmalarda CPR uyarı eşiklerini ayarlamak için CPR Cihazı AYARLARI panelindeki tercihleri değiştirin.

Tercih	Açıklama
Bastırma hızı (bastırma/dakika)	Minimum: Kurtarıcı bu hızın altında bastırma gerçekleştirirse AED "Daha hızlı baskı uygulayın" uyarısını verir. Maksimum: Kurtarıcı bu hızın üzerinde bastırma gerçekleştirirse AED "Daha yavaş baskı uygulayın" uyarısını verir.
Bastırma derinliği (cm)	Minimum: Kurtarıcı bu bastırma derinliğine ulaşmazsa AED "Daha güçlü baskı uygulayın" uyarısını verir. Maksimum: Kurtarıcı bu bastırma derinliğinden daha derine bastırırsa AED "Daha hafif baskı uygulayın" uyarısını verir.

Bir kurtarmayı gözden geçirme

Kurtarmalar sekmesinin altındaki **Özet** sekmesinde zaman, uygulanan defibrilasyon şoklarının sayısı ve kurtarmanın uzunluğu gösterilir.

Kurtarma Merkezi	Özet	AED Anlık Görüntüsü
Kurtarma Özeti		
Kaza Bilgileri		
Kaza Kimliği	87_7920_87	
Tarih/Saat	9/14/2014 9:44:54 PM (+-)DST	
Şok Sayısı	0	
Kurtarma Süresi	166 saniye	

Kurtarma zamanında AED'nin programlanmış olduğu tüm ayarları görmek için **AED Anlık Görüntüsü** sekmesini görüntüleyin. Ayarlarla ilgili açıklamalar için bkz. *AED ve kurtarma parametrelerini ayarlama* sayfa 8-12.

EKG dalga biçimini ve kurtarma olaylarını görüntüleme

Kurtarma Merkezi sekmesinin altındaki **Dalga Biçimi ve Olaylar** sekmesine tıklayın.

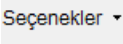
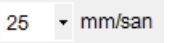
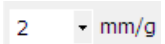
Olay listesi, AED'nin kurtarma sırasında gerçekleştirdiği tüm AED işlemlerini gösterir.

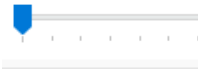
Olay listesinin altındaki grafik, kurtarma olaylarıyla birlikte hastanın EKG'sinin ve CPR Cihazı Destekli CPR'sinin kaydını gösterir.

- ▲ Olay listesinden bir öge seçin.

Grafik, kurtarma içinde olayın meydana gelmiş olduğu yere gider.

- ▲ Zaman içinde ileri ve geri gitmek için dalga biçiminin üzerinde fareyi sürükleyip bırakın.
- ▲ Dalga biçimine notlar ekleyin. Grafik üzerinde bir notun görüntülenmesini istediğiniz yere sağ tıklayın. Bağlam menüsünden **Kullanıcı Açıklaması Ekle**'yi seçin. **Olay Oluştur/Düzenle** iletişim kutusunda, adı ve yorumu yazıp **Kaydet**'e tıklayın.
- ▲ Kurtarmayı gerçek zamanlı olarak oynatmak (kurtarma olayının bir saniyelik kısmı bir saniyede oynatılır), dalga biçiminde ve kurtarmada ileri ve geri gitmek için oynatıcı denetimlerini kullanın.

	Bir sayfa geriye git		Görüntülenecek öğeleri seçin: CPR grafiğini göster, olay listesinde şok esas saatini göster, kullanıcı tarafından eklenen olayları göster, olay işaretçilerini göster
	Bir saniye geriye git	 10 mm/mV	EKG grafiğinin dikey ölçeğini ayarlayın (5 - 25 mm/mV)
	Kaydı oynat	 25 mm/san	EKG ve CPR grafiklerinin yatay ölçeğini ayarlayın (10 - 40 mm/saniye)
	Oynatmayı durdur	 2 mm/g	CPR grafiğinin dikey ölçeğini ayarlayın (1-3 mm/g; g=m/sn ²)

	Bir saniye ileriye git		Dalga biçimi sekmesini ayrı bir pencerede açmak için tıklayın. Kaydı tam ekran olarak görüntülemek için bu pencereyi büyütebilirsiniz.
	Bir sayfa ileriye git		Yakınlaştırmak için işaretçiyi yukarıya veya uzaklaştırmak için işaretçiyi aşağıya sürükleyin. + veya - düğmelerine tıklayıp yavaş yavaş yakınlaştırabilir/ uzaklaştırabilirsiniz.
	Kurtarma dalga biçimini yazdır		Kurtarmanın farklı kısımlarını görüntülemek için konum işaretçisini sola ve sağa sürükleyin.

Kaza bilgilerini görüntüleme ve güncelleme

Kurtarmalar sekmesine tıklayın. Görüntülenecek kurtarmayı seçin. **Kaza** sekmesine tıklayın.

Kaza formunu kullanarak hastanın yaşını ve cinsiyetini ve kurtarma ile ilgili genel bilgileri ekleyin.

Bu bilgilerin değiştirilebilmesi veya kaydedilebilmesi için AED'nin bağlı olması gerekmez.

Formu doldurmak için:

1. Güncellenecek veya eklenebilecek verileri yazın veya açılır menülerden seçin.
2. İşlem tamamlandığında **Veritabanına Kaydet**'e tıklayın.

Kaza verilerini ve kurtarma dalga biçimlerini yazdırma

Kaza ve **Dalga biçimi** sekmelerinde görüntülenen bilgileri yazdırabilirsiniz.

Sadece dalga biçimini yazdırmak için:



- ▲ Simge çubuğunda, **Kurtarmalar | Dalga Biçimi ve Olaylar** sekmesinin altındaki **Yazdır** simgesine tıklayın.

Dalga biçimini, kurtarma olaylarını ve kaza bilgilerini yazdırmak için:

1. Kurtarma listesindeki bir kurtarmaya sağ tıklayın.
2. **Kurtarma Raporunu Yazdırın** ögesini seçin.
3. **Yazdır**'a tıklayın.

Olay mesajlarını gözden geçirme

Olay Günlüğü sekmesinde AED olayları ve hatalarıyla ilgili bilgileri görüntüleyebilirsiniz.

AED, sistem otomatik testleri ve kapağın açılması veya kapatılması gibi farklı eylemleri kaydeder.

1) **Olay Günlüğü:** AED tarafından kaydedilmiş tüm otomatik testleri listeler.

2) **Mevcut Hatalar:** AED tarafından oluşturulan hataları listeler.

Event Log			
Time	Event Type	Sub Information	
1/19/2012 12:32:56 PM (UTC-08:00) Pacific Time (US & Canada) (+)JST	Selftest	Powerup	Completed
1/19/2012 12:33:45 PM (UTC-08:00) Pacific Time (US & Canada) (+)JST	Selftest	Powerup	Completed
1/19/2012 12:40:28 PM (UTC-08:00) Pacific Time (US & Canada) (+)JST	Selftest	Powerup	Completed
1/19/2012 12:40:32 PM (UTC-08:00) Pacific Time (US & Canada) (+)JST	Selftest	Powerdown	Completed
1/19/2012 12:48:28 PM (UTC-08:00) Pacific Time (US & Canada) (+)JST	Selftest	Powerup	Completed
1/19/2012 12:48:32 PM (UTC-08:00) Pacific Time (US & Canada) (+)JST	Selftest	Powerdown	Completed
1/19/2012 12:48:41 PM (UTC-08:00) Pacific Time (US & Canada) (+)JST	Selftest	Powerup	Completed
1/19/2012 12:48:52 PM (UTC-08:00) Pacific Time (US & Canada) (+)JST	Selftest	Powerdown	Completed
1/19/2012 2:49:08 PM (UTC-08:00) Pacific Time (US & Canada) (+)JST	Selftest	Powerup	Completed
1/19/2012 3:10:13 PM (UTC-08:00) Pacific Time (US & Canada) (+)JST	Selftest	Powerup	Completed
1/19/2012 3:10:17 PM (UTC-08:00) Pacific Time (US & Canada) (+)JST	Selftest	Powerdown	Completed
1/20/2012 7:21:05 AM (UTC-08:00) Pacific Time (US & Canada) (+)JST	Selftest	Powerup	Completed
1/20/2012 7:21:09 AM (UTC-08:00) Pacific Time (US & Canada) (+)JST	Selftest	Powerdown	Completed
1/20/2012 7:21:18 AM (UTC-08:00) Pacific Time (US & Canada) (+)JST	Selftest	Powerup	Completed
1/20/2012 8:34:04 AM (UTC-08:00) Pacific Time (US & Canada) (+)JST	Selftest	Powerup	Completed
1/20/2012 8:34:07 AM (UTC-08:00) Pacific Time (US & Canada) (+)JST	Selftest	Powerdown	Completed

Current Errors	
Time	ID
1/1/2012 7:08:24 AM (UTC-08:00) Pacific Time (US & Canada)	0x905
1/1/2012 7:08:23 AM (UTC-08:00) Pacific Time (US & Canada)	0x908
1/24/2012 12:46:24 AM (UTC-08:00) Pacific Time (US & Canada)	0x70809
1/19/2012 12:40:31 PM (UTC-08:00) Pacific Time (US & Canada)	0x50505
1/25/2011 5:30:06 PM (UTC-08:00) Pacific Time (US & Canada)	0x50231
1/25/2011 5:24:42 PM (UTC-08:00) Pacific Time (US & Canada)	0x5022F
1/25/2011 5:24:42 PM (UTC-08:00) Pacific Time (US & Canada)	0x5080F
1/24/2011 1:27:18 PM (UTC-08:00) Pacific Time (US & Canada)	0x806

AED Bilgilerinin Yazdırılması - AED Verilerinin İe/Dışa Aktarılması

Baęlı bir AED'nin otomatik testlerini gözden geçirebilir, yapılandırmasını yazdırabilir, AED verilerini ie/dışa aktarabilir..

AED bilgilerini yazdırma

1. AED listesinden bir AED seçin. AED'nin baęlı olması gerekmez.
2. **Dosya | Rapor Oluştur | AED Raporunu Yazdır** öęesini seçin.

AED verilerini alma ve dışa aktarma

Daha önce kaydedilmiş bir AED veri dosyanız varsa AED Yöneticisi'nde bu dosyayı yükleyip görüntüleyebilirsiniz.

Bir AED veri dosyasını almak için:

1. **Dosya | İe Aktar | AED verilerini dosyadan ie aktar** ögelerini seçin.
2. Alınacak dosyayı seçin.

Alınan AED, baęlı olmayan AED'ler listesinde görünür.

AED verilerinin tamamını sıkıştırılmış bir dosya biçiminde dışa aktarabilirsiniz. Bu dosya ek analiz için dięer uygulamalarla birlikte kullanılabilir.

AED verilerini dışa aktarmak için:

1. Baęlı olan veya baęlı olmayan AED'ler listesinden dışa aktarılacak AED'yi seçin.
2. **Dosya** menüsünü ve ardından **Dışa Aktar | Tek Bir Dosya için Seçili AED Verileri** öęesini seçin.

EKG dalga biçimi ve kayıtlı kurtarma olayları dahil olmak üzere tüm kurtarmalar sıkıştırılmış tek bir dosyaya kaydedilir.

Uzaktan erişimli AED'lerin yapılandırılması (yalnızca Yönetici düzeyi)

AED cihazlarının yapılandırmasını, cihazları AED Yöneticisi bilgisayarına taşımak yerine bulundukları yerde güncelleyebilirsiniz. Tek bir USB flash disk kullanarak stokunuzdaki tüm AED cihazlarını yapılandırabilirsiniz. Flash disk AED cihazının USB bağlantı noktasına takarak her bir AED cihazını yerinde güncelleyin. Flash disk taktığınızda, AED seçtiğiniz yapılandırma parametrelerini kopyalar.

Uzaktan erişimli AED'leri yeni bir yapılandırmayla güncellemek için:

1. Bağlı veya bağlı olmayan cihazlar listesinden bir AED seçin. Dilediğiniz AED'yi seçebilirsiniz.
Not: Bir AED seçmelisiniz. Flash diskin hazırlanması için seçtiğiniz cihazın yapılandırması gerekli.
2. USB flash disk bilgisayara bağlayın.
3. **Dosya | USB flash diskini yapılandırma yükseltmesi için hazırla** öğelerini seçin.
4. Açılan USB Flash Disk hazırlama penceresinde flash disk seçin.
DİKKAT! Formatlama işlemi flash diskteki tüm verileri siler.
5. **Sonraki** ögesine tıklayarak flash disk formatlayın (hazırlayın).
6. Yapılandırma penceresinden istediğiniz parametreleri seçin. Yapılandırma iletişim kutusundaki paneller **Özet sekmesinin** altındaki panellerle aynıdır.
7. Yapılandırmayı gözden geçirin. Değişiklikleriniz tamamlandıysa **Kaydet** ögesine tıklayın.
Kaydet ögesine tıklandıktan sonra AED Yöneticisi yapılandırma dosyalarını USB flash diske yazdırır.
8. Flash disk USB bağlantı noktasından çıkarın.



ZOLL Medical Corporation
269 Mill Road
Chelmsford, MA USA
01824-4105

Powerheart, STAR, Intellisense, Rescue Ready, RescueCoach, ve RHYTHMx,
ZOLL Medical Corporation'in ticari markalarıdır.
Telif Hakkı © 2026 ZOLL Medical Corporation. Tüm Hakları Saklıdır.

70-02075-26 C

