


○ THERMOGARD HQ™ セットアップガイド


1 コイルの挿入

- A. コンソールの電源を入れます
- B. フタを開けます
- C. コイルを温度コントロール槽に入れます
- D. フタを閉じ、フタのスリットにチューブを通します

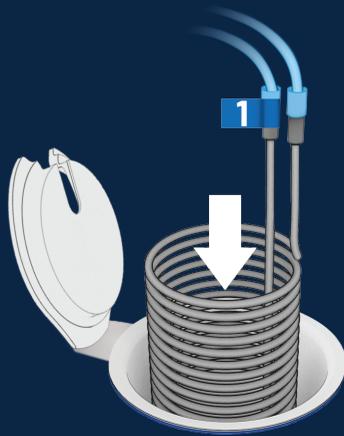

2 エアトラップの配置

オレンジ側を下にして
スタンドに置きます

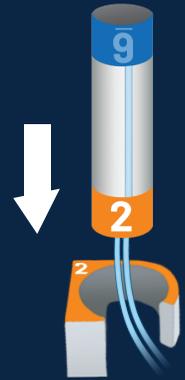

3 ポンプチューブの取り付け

- A. ローラーポンプカバーを開けます
- B. チューブディスクをソケット3に完全に挿入します
- C. チューブを送り込みながらノブを反時計回りにしっかりと回します
- D. チューブを3に完全にはめ込みます



4 生理食塩水バッグへのスパイク挿入

生理食塩水バッグ内に
スパイクが完全に挿入
されているのを確認します



5 チューブのプライミング

- A. ローラーポンプカバーを閉じます
- B. ボタンを押してから離します
- C. ポンプが2分間作動します
フローインジケータが回転すること、
気泡が除去されたことを確認
します



⚠ 2分経過しても気泡がある場合は、2~5のステップを再チェックします

6 エアトラップの挿入

- A. 青色側を下にして
チャンバー内に挿入します
- B. コンソールの上部
カバーを閉じます



⚠ チューブが上部カバーに挟まれていることを確認します
正しい配置については裏ページ
をご覧ください

THERMOGARD HQ™ セットアップガイド

ローラー
ポンプに取り
付けられた
ポンプチューブ

チューブが上部
カバーに挟まれて
いない

バッグのチューブが
溝にはめ込まれて
いる

チューブが溝に
はめ込まれている

T1: T1患者体温プローブ

T2: T2患者体温プローブ (任意)

治療時のカテーテルの接続



搬送時のカテーテルの接続



ZOLL

ZOLL Circulation, Inc.
2000 Ringwood Avenue
San Jose, CA 95131 USA
+1-877-225-7487
www.zoll.com

THERMOGARD HQ™ ディスプレイガイド

T1: T1プローブの患者体温
T2: T2プローブの患者体温

Power: 目標体温達成または維持のために、本システムがどの程度動作しているかを示します。



THERMOGARD HQ™ ディスプレイガイド

①②は日本未対応です。

①	②	③	④
WiFi接続	WiFi バッテリー	デジタルEMR (電子カルテ) 出力	患者体温出力
● 接続されていない	● 電源オフ状態	● 無効	● 無効
● 接続されている	● 充電済み	● 有効	● 有効
● 要確認	● 要交換	● 要確認	● 要確認

⑤

USBへのデータのダウンロード:

1. USBドライブを挿入する
2. 緑色に点灯するまで待つ
3. USBドライブを抜く

- 接続されていない
- コピー中
- 完了
- 要確認

