

AED Plus® Trainer2

Accesorios de capacitación



Control total de la simulación en las manos del instructor

El AED Plus Trainer2 de ZOLL® permite que los instructores de RCP y primeros auxilios dejen que los estudiantes prueben cómo se usa AED Plus para salvar una vida. Elija entre cuatro escenarios de rescate predeterminados distintos o bien controle totalmente el rescate completo en forma manual. Un controlador remoto inalámbrico permite controlar múltiples dispositivos AED Plus Trainer2.

Con este simple controlador remoto, los instructores pueden configurar un escenario de rescate y descargarlo al AED Plus Trainer2 en segundos. El estudiante presiona el botón de encendido/apagado de la unidad Trainer2 para comenzar. Luego, el instructor determina si aplicar o no una descarga durante el siguiente análisis cardíaco simulado, si las almohadillas se han colocado o no en forma adecuada, y cuándo la unidad Trainer2 debe indicar "PRESIONAR MÁS FUERTE" y "BUENAS COMPRESIONES". Un simple botón de pausa permite al instructor detener el rescate, dialogar con el alumno y, a continuación, reanudar el rescate simulado exactamente donde este se interrumpió.

Directrices de 2010 de AHA y ERC preparadas

El software Trainer2 cambia con facilidad de las directrices de 2010 de la AHA a las de la ERC

AED Plus Trainer2 incluye todo lo que necesita un instructor

- AED Plus Trainer2 para capacitación DEA
- Mando remoto inalámbrico
- Un juego de AED Plus Training CPR-D-padz®
- Un juego de geles reutilizables de AED Plus Trainer CPR-D-padz
- Cuatro baterías de célula D
- Dos baterías de célula AA
- Manual del usuario

ZOLL®

Accesorios de AED Plus Trainer2



Controlador remoto de recambio
N° de ref. 8008-0007



Maletín de transporte
N° de ref. 8000-0375-01



Maniquí de demostración del instructor
N° de ref. 8000-0835-01

Especificaciones de AED Plus Trainer2

Dimensiones: 5,25 pulgadas de alto x 9,5 pulgadas de ancho x 11,5 pulgadas de profundidad (13,3 cm de alto x 24,1 cm de ancho x 29,2 cm de profundidad)

Peso: 2,2 kg

Alimentación: 4 células D (incluidas) para Training AED (aptas para más de 100 horas de capacitación), 2 células AA (incluidas) para mando remoto, adaptador de CA no incluido; solo funciona con baterías.



Escenarios de rescate

Con este simple mando remoto, los instructores pueden configurar hasta cinco situaciones de rescate diferentes.



Accesorios del AED Plus Trainer2

(Las piezas de recambio se deben pedir por separado)



Recambio de gel adhesivo para electrodos del instructor CPR-D-padz,
n° de ref. 8900-0803-01



Electrodos del instructor CPR-D-padz,
n° de ref. 8900-0804-01



Electrodos del instructor Stat-padz® II,
n° de ref. 8900-0805-01
(caja de 6)



Electrodos del instructor Pedi-padz® II,
n° de ref. 8900-000861-01
(caja de 6)

ADVANCING RESUSCITATION. TODAY.®

ZOLL Medical Corporation
Worldwide Headquarters
269 Mill Road
Chelmsford, MA 01824
978-421-9655
800-348-9011

Para ver las direcciones y números de fax de las subsidiarias, así como otras ubicaciones globales, vaya a www.zoll.com/contacts.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

©2011 ZOLL Medical Corporation. Reservados todos los derechos. Advancing Resuscitation Today, AED Plus, CPR-D-padz, Pedi-padz, Stat-padz y ZOLL marcas comerciales o marcas registradas de ZOLL Medical Corporation en Estados Unidos y en los demás países. Todas las demás marcas comerciales pertenecen a sus respectivos propietarios.
Impreso en EE.UU. 061110 9656-0202-23

ZOLL®