

1 Lieferung auspacken

2 Pumpen Tasten/Bedienung

Durchflussrate wählen Alarme Pumpen Status

Start/Stop Ein/Aus

3 AAA Batterien einlegen

4 Verbindung Beutel, Kartusche IV-Sets herstellen

5 Kartusche einlegen

6 Einschalten, IV-Set vorfüllen und Luftentfernung

Hinweis: Pumpe abkippen, zur Luftentfernung auf die Kartusche klopfen.

7 IV-Flüssigkeiten infundieren

IV-Set am Patientenkatheter befestigen

18 ga optimal für Kristalloide*

BOLUS 250cc in 2.5 min

Durchflussrate einstellen

4L/h, 6L/h, 2L/h, 1L/h, 0.2L/h

BLUT * MEDIKAMENTE

8 IV-Beutel wechseln

Hinweis: Klemme am IV-Set vor dem Wechsel schließen

9 Infusion beenden

10 Freier Durchfluss falls gewünscht

Ⓜ Kartusche ist Einmal-Verbrauchsmaterial.