

ZOLL AED 3® Trainer

AED 및 부속품 교육



실시간 CPR feedback을 제공하는 Real CPR Help 기능을 탑재한 ZOLL AED 3

ZOLL AED 3® Trainer는 AED 교육 솔루션으로 압박 품질에 대한 실시간 피드백을 제공하는 Real CPR Help® 기능을 탑재하고 있습니다. 본 Trainer는 교육환경에서 적절한 CPR 가슴 압박 속도 및 깊이를 피교육자에게 학습할 수 있도록 합니다.

ZOLL AED 3 Trainer는 임상 AED의 수행을 매우 유사하게 따라하도록 설계되어 있어 더욱 실제같은 구조 경험을 제공합니다. ZOLL AED 3 Trainer에는 다음 사항이 포함됩니다.

- 피교육자가 임상 환경에서 ZOLL AED 3 기기를 통해 보게 될 구조 이미지를 컬러로 제공하는 활성 LCD 화면
- 인체 모형과 패드의 접촉을 감지하기 때문에 구조 시뮬레이션을 위한 원격 제어가 필요 없는 교육용 패드의 접촉 센서
- 교육자로 하여금 교육 시나리오를 잠시 멈출 수 있게 하는 기기 내의 일시 정지 버튼
- 비용 효율성이 높은 소모품
- 손쉬운 USB 소프트웨어 업데이트/언어 설정

가이드라인 준비

쉬운 설정: 모든 설정 및 교육 시나리오 관리가 Trainer 기기에서 수행됩니다. 설정 가능한 옵션은 다음과 같습니다.

- 교육 시나리오
- 작동 모드(반자동 또는 완전 자동)
- 일반 구조자를 위한 가이드
- 호흡 점검 가이드
- 음성 가이드 볼륨
- 언어(주문한 부품 번호에 따라 다름)


ZOLL AED 3 Trainer에는 교육에 필요한 모든 것들이 포함되어 있습니다.

- ZOLL AED 3 Trainer 기기
- ZOLL AED 3 Trainer CPR Uni-padz® 전극 교육용 하네스(최소 100회 교육 세션)
- ZOLL AED 3 Trainer CPR Uni-padz용 Trainer 전극 라이너(최소 50회 교육 세션)
- 4개의 D 사이즈 건전지
- 사용자 설명서


ZOLL®



실시간 CPR feedback 및 커다란 2가지 색상의 압박 깊이 지표

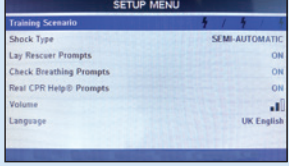

기기에서 직접 기기 작동 및 구조 시나리오를 설정하세요

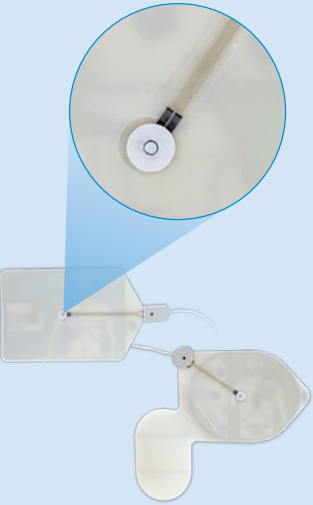

패드 센서는 인체 모형과의 접촉을 감지하여 별도의 원격 지원이 필요 없습니다.

ZOLL AED 3 Trainer 사양

사이즈: (높이 x 너비 x 깊이)

5.0 in x 9.3 in x 9.7 in
(12.7cm x 23.6cm x 24.7cm)

배터리 포함 무게: 3 lbs, 15oz (1.8 kg)

동력: 교육용 AED D 사이즈 건전지 4개(포함됨)(16시간 이상 사용 가능)

구조 시나리오

교육자는 소프트 키를 사용하여 Trainer 기기에서 직접 다양한 구조 시나리오를 설정할 수 있습니다.



ZOLL AED 3 Trainer 부속품

교체품은 별도 주문 사항입니다.



Trainer CPR Uni-padz® 전극 교체 접촉 젤
부품 번호 8028-000014(5개들이 상자)



Trainer CPR Uni-padz 전극 교체
라이너 부품 번호 8028-000013



Trainer 시범용 인체 모형
부품 번호 8000-0835-01



Trainer USB 소프트웨어
업그레이드 키트
부품 # 8028-000011-XX



CPR Uni-padz 전극 교육 벨트
부품 번호 8028-000010

ZOLL Medical Corporation
Worldwide Headquarters
269 Mill Road
Chelmsford, MA 01824
978-421-9655
800-804-4356

자회사 정보 및 전 세계 기타 사업장
정보는 www.zoll.com/contacts에서
확인하실 수 있습니다.

사양은 예고 없이 변경될 수 있습니다.

©2023 ZOLL Medical Corporation. 모든 권리 보유. Real CPR Help, Uni-padz, ZOLL 및 ZOLL AED 3은 미국 및/또는 기타 국가 소재 ZOLL Medical Corporation의 상표 또는 등록 상표입니다. 다른 모든 상표는 각 상표 소유권자의 자산입니다. ZOLL AED 3 제세동기는 미국에서 판매되지 않습니다.

미국에서 인쇄 MCN IP 2203 0580-14

ZOLL