

# Thermogard XP®

## INSTRUCCIONES DE LIMPIEZA



### Procedimiento de limpieza de Thermogard XP

- Asegúrese de que la consola esté apagada y de que el cable de alimentación esté desenchufado.
- Limpie la parte exterior de la consola con un paño suave humedecido con una mezcla de agua y un detergente suave.
- Nunca utilice disolventes o limpiadores abrasivos para limpiar la consola. Evite frotar con demasiada fuerza, en particular la superficie frontal de la pantalla.
- Para realizar una limpieza y descontaminación general, recomendamos utilizar toallitas desechables germicidas que incluyan al menos un 55 % de isopropanol u otro desinfectante no corrosivo aprobado para su uso en hospitales.
- ZOLL recomienda encarecidamente probar el desinfectante en una pequeña zona de la superficie exterior de la consola antes de limpiar el resto de superficies. Siga las instrucciones proporcionadas por el fabricante del desinfectante.
- Después de realizar la limpieza, pase un paño humedecido con agua por las superficies exteriores para eliminar las manchas o residuos restantes.
- Deslice y extraiga la bandeja colectora de condensado de la parte inferior delantera de la consola. La bandeja puede lavarse con jabón y agua caliente. No utilice nunca disolventes o limpiadores abrasivos para limpiar la bandeja. Deje secar la bandeja y, una vez limpia, vuelva a colocarla en la consola.

**Nota:** No utilice la consola sin la bandeja colectora de condensado correctamente instalada. De lo contrario, podría acumularse agua en el suelo, debajo de la consola.

- Consulte el manual del usuario de Thermogard XP para conocer cómo administrar la solución de enfriamiento, el procedimiento de limpieza completa y las instrucciones de funcionamiento.

### Productos para la limpieza de Thermogard XP

- Toallitas con isopropanol 70 % (IPA)
- Toallitas germicidas con lejía
- Agua caliente y jabón